

Návod na použitie dreveného lehátka Start trojdielneho



**Výhradný distribútor značky Revixa je REVIXA s.r.o. Nitra, Golianova 66.
IČO: 50699431, DIČ: 2120430026, IČ DPH: SK2120430026**

Tento návod poskytuje detailné inštrukcie na používanie a údržbu zariadenia. Oboznámte sa s ním pred používaním masážneho lehátka. Návod si odložte pre prípadných ďalších používateľov masážneho lehátka Start.

Nosnosť masážneho lehátka - 204kg

- Celková nosnosť lehátka s klientom, príslušenstvom aj vyvinutým tlakom pri terpii je celkom 204kg.
- Lehátko nepreťažujte za žiadnych okolností, môže prísť k poškodeniu lehátka a zraneniu osoby.
- Je zakázané na masážne lehátko skákať.

Postup po obdržaní masážneho lehátka

- Masážne lehátko je zabalené v kartónovej krabici z 8-vrstvového papiera, ktorý poskytuje dobrú ochranu pre daný tovar.
- Balenie (kartónovú krabicu) odporúčame odložiť, pre budúce použitie, najmä pre prípadné vrátenie tovaru počas záručnej doby.
- Masážne lehátko je zabalené tiež v taške. Lehátko vyberieme z tašky.

Postup pri rozložení masážneho lehátka

- Umiestnite zatvorené lehátko na gumenné dorazy, ktoré sú na jednej strane lehátka a uvoľnite západky (Obrázok 1).
- Otvorte lehátko a rozťahnite nohy lehátka, pokiaľ nebudú plne rozťahnuté (Obrázok 2, Obrázok 3).
- Nakloňte stôl vzpriamene, až kým nebudú všetky štyri nohy na podlahe.
- Nadvihnite prednú časť lehátka a druhou rukou zatlačte na stred lehátka, aby boli lanká na lehátku našponované (Obrázok 4).

Postup pri zložení masážneho lehátka

- Otočte lehátko na gumené dorazy k podlahe.
- Zložte nohy masážneho lehátka (Obrázky 3 a 2).
- Zatvorte západky (Obrázok 1).



Obrázok 1



Obrázok 2



Obrázok 3



Obrázok 4

Ako používať podhlavník

- Vložte tyčky podhlavníka do otvorov na masážnom lehátku. Rýchloupínak musí byť uvoľnený, aby tyčky mohli vojsť do dier na masážnom lehátku (Obrázok 1).
- Nastavte si požadovaný uhol podhlavníku a utiahnite rýchloupínak smerom dole. Podhlavník sa zaistí (Obrázok 2).
- Potiahnutím rýchloupínaku hore sa podhlavník uvoľní a môžete podhlavník demontovať z masážneho lehátka (Obrázok 3).



Obrázok 1



Obrázok 2



Obrázok 3

Ako používať podperu na ruky

- Umiestnite podhlavník na rovnú plochu a navlečte popruhy podhlavníka na tyčky podhlavníka (Obrázok 1).
- Vložte podhlavník do dier na masážnom lehátku a prevlečte predný popruh so suchým zipsom na prednú časť podhlavníku (Obrázok 2).
- Umiestnite vankúš na vrch podhlavníku a zaistite vankúš suchými zipsami (Obrázok 3).



Obrázok 1



Obrázok 2



Obrázok 3

Ako nastaviť výšku lehátka

- Uvoľnite skrutky na nohe masážneho lehátka (Obrázok 1 a 2).
- Vyberte nohu lehátka od konštrukcie lehátka a nastavte požadovanú výšku.
- Na túto inštaláciu je dobré prizvať si na pomoc druhú osobu, aby vám váhu lehátka podržal.
- Skrutky na lehátku pevne dotiahnite. Celý tento postup opakujte na všetkých nohách.



Obrázok 1




Obrázok 2

Nastavenie opierky chrbta a nôh / tretej časti masážneho lehátka

- Uvoľnite dve spony na zadnej časti masážneho lehátka (Obrázok 1).
- Nastavte opierku ťahom hore do požadovaného uhla. Opierka sa sama zaistí (Obrázok 2 a 3).
- Opierku vráťte do vodorovnej polohy tak, že opierku ťahom ruky nahor nastavíte do maximálnej výšky, potom sa zámok opierky deaktivuje a opierku môžete vrátiť do vodorovnej polohy (Obrázok 2 a 3).



Obrázok 1

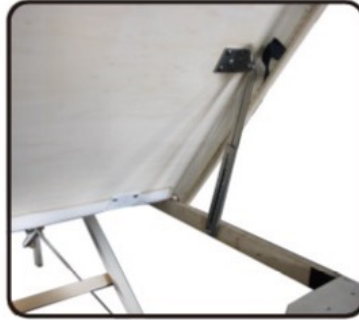

Obrázok 2



Obrázok 3

Príslušenstvo k masážnemu lehátku



Podhlavník



Vankúš



Podpera
na ruky



Podpera na ruky



Prenosná taška

Bezpečnostné opatrenia

- Pred použitím skontrolujte všetky spojové časti masážneho lehátka. Pri zistení poškodenia nás ihneď kontaktujte (môže prísť k poškodeniu lehátka, alebo k ublíženiu na zdraví).
- Nevytvárajte žiadne zásahy, alebo neinštalujte žiadne iné časti k lehátku, ktoré nie sú súčasťou lehátka.

Dôležité upozornenia

- Nesprávne používanie masážneho lehátka môže viesť k zraneniu osôb a poškodeniu masážneho lehátka.
- Skontrolujte čalúnenie masážneho lehátka, či neprišlo k poškodeniu. Akékoľvek poškodenie nám nahláste. Záruka sa nevšahuje na poškodenie čalúnenia pri nesprávnom

používání, skladání, rozkladání a používání masážního lehátka na jiné účely ako je určené.

- Maximálna pracovná záťaž lehátka je 204 kg, statická 1250 kg.
- Pred každým použitím skontrolujte všetky spojované časti, či sú dostatočné dotiahnuté, skontrolujte či je lehátko správne rozložené na rovnej podlahe. Inak môže prísť k zraneniu osôb a poškodeniu masážneho lehátka.
- Nezaťažujte nadmerne podhlavník a iné časti lehátka.
- Nevystavujte lehátko extrémnym teplotám a vlhkosti.
- Zabezpečte, aby sa k masážnemu lehátku nedostali deti a zvieratá.

Ako sa starať a udržiavať vaše masážne lehátko

Povrch masážneho lehátka

- K utretiu povrchu masážneho lehátka používajte jemný uterák. Používajte špeciálny čistiaci prípravok na koženku. Prípravok po koženke utierajte rovnomerne. Potom na očistenie použite čistý jemný uterák/utierku. Koženky sa nedotýkajte mokrým oblečením, kyslími alebo zásaditými chemikáliami.
- Ak dodržíte tieto pokyny, koženka masážneho lehátka vám bude slúžiť dlhú dobu.
- Neutierajte lehátko alkoholom. Alkohol vysušuje koženku a môže prísť k popraskaniu.
- Aby ste povrch masážneho lehátka udržali v dobrom stave, je potrebné ho čistiť pravidelne. Myslite na to, že masážne lehátko musí byť čistené a dezinfikované po každom použití, po každom klientovi. Kompletná dezinfekcia sa dôrazne odporúča raz za mesiac.
- Pri používaní sa odporúča prekryť lehátko ochrannou plachtou.

Pozáručný servis:

REVIXA s.r.o.

Nitra, Golianova 66.

info@revixa.sk

0904 158 489



Ďakujeme, že ste si zakúpili náš výrobok a veríme, že budete dlhú dobu spokojný s kvalitou daného výrobku.