

Návod / požívateľská príručka na zloženie a používanie kozmetického kresla Basic.

Pred prvým použitím si prečítajte dôkladne tento návod na použitie.

Tento návod poskytuje detailné inštrukcie pre používanie zariadenia. Prosíme, zariadenie sa naučte používať podľa inštrukcií. Tento návod uchovajte pre prípadné ďalšie používanie iným užívateľom.

Maximálna záťaž


- 150 kg

Maximálna nosnosť pre podporu chrbta a podporu nôh je 30 kg. Maximálna záťaž stredovej časti je 150 kg. Neprekračujte maximálnu nosnosť celého kresla, ktorá je 150 kg. Je zakázané na kreslo skákať, pretože môže prísť k poškodeniu konštrukcie.

Poučenie po obdržaní tovaru

- Kozmetické kreslo je zabalené v kartónovej krabici z 10-vrstvového papiera, ktorý poskytuje dobrú ochranu pre daný tovar.
- Balenie (kartónovú krabicu) odporúčame odložiť, pre budúce použitie, najmä pre prípadné vrátenie tovaru počas záručnej doby.
- Pre väčšiu ochranu človeka sú potrebné k vybraníu kozmetického kresla z krabice dvaja ľudia. Pri vyberaní masážneho lehátka stojí jedna osoba v prednej časti a druhá osoba v zadnej časti kozmetického kresla.
- Pri prevzatí tovaru ho najskôr dôkladne skontrolujte. V prvom rade balenie a následne i kozmetické kreslo, či neprišlo k poškodeniu. Ak vidíme očividné znaky poškodenia, najneskôr do 24h od prijatia tovaru kontaktujte predajcu.
- Uistite sa, že všetko vybavenie kozmetického kresla je v čase doručenia kompletne. V prípade, že niektoré časti chýbajú, kontaktujte ihneď predajcu.
- Kozmetické kreslo používajte v normálnom suchom prostredí, kde je teplota medzi +10°C až +40°C a vlhkosť medzi 30% až 75%. Ak z nejakého dôvodu klesne teplota pod 0°C, nastavte teplotu miestnosti späť na požadovanú prevádzkovú teplotu a počkajte 5 hodín, kým kozmetické kreslo začnete znovu používať.
- Pred použitím masážneho kresla si prečítajte nasledovné inštrukcie:
 - Uistite sa, že všetok obalový materiál je dostatočne odstránený.
 - Uistite sa, že kreslo sa môže pohybovať a polohovať podľa potreby.
- Dôležité! Deti, alebo nezaučení ľudia nesmú používať kozmetické kreslo. Deti držte v dostatočnej vzdialenosti od kresla. Pre zvýšenú bezpečnosť, prosím zamknite kreslo, pokiaľ sa nepoužíva a nie je pod dohľadom.

Tento produkt je manuálne **kozmetické kreslo**, ktoré je prispôsobené pre profesionálne terapie. Kreslo môže byť používané na rôzne druhy terapií. Je dizajnové na pohodlné ležanie a tiež sedenie. Celé kreslo sa skladá z troch hlavných sekcií a páru opierok na ruky, ktoré sa dajú nastaviť do rôznych pozícií. Produkt je navrhnutý pre ľudí, ktorí sú starší ako 12 rokov a výšku majú nad 145cm.

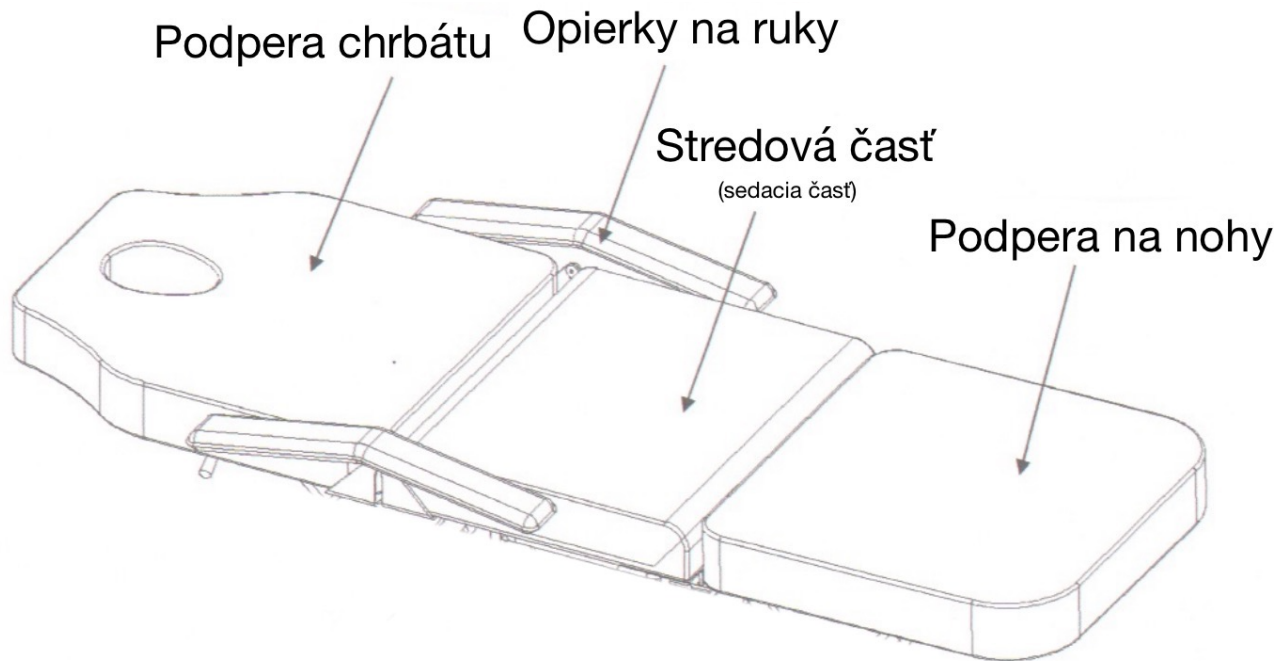

Varovanie a opatrenia

- Podpera na chrbát s dierou na tvár nemôže byť zaťažovaná plnou váhou dospelého človeka.
- Neskáčte priamo na kreslo.
- Nepoužívajte a neumiestňujte kreslo v blízkosti horľavého plynu.
- Nesadajte si na opernú časť chrbta a podporu na nohy.
- Pred nastavením kresla a jeho častí sa uistite, že sa nenachádzajú v blízkosti kresla žiadne prekážky.
- Kreslo nepreťažujte.

UPOZORNENIE

- Pred premiestňovaním kresla sa uistite, že sa v okolí nenachádzajú žiadne prekážky, aby ste sa vyhli zraneniu a poškodeniu produktu.
- Zaisťte bezpečný priestor okolo kresla. Nepristupujte ku kreslu s ostrými predmetmi alebo inými škodlivými predmetmi.
- Neupravujte konštrukciu kresla a neinštalujte prídavné časti a zariadenia. Ak kreslo nepracuje normálne, prestaňte ho používať a zavolajte servis.
- Neumiestňujte kreslo do prašného prostredia.


Funkcia nastavenia uhlu opierky chrbta (nastavenie uhla od 0° do 76°)

Pre nastavenie uhla opierky chrbta postupujte nasledovne: Uchyťte rukou opierku chrbta, následne druhou rukou potiahnite madlo. Madlo odistite a opatrne nastavte ťahaním alebo odtlačaním opierky chrbta. Po nastavení požadovaného uhlu, zaistite madlo do príslušnej medzery medzi zubmi.

Funkcia nastavenia uhlu opierky nôh (nastavenie uhla od 0° do 70°)

Pre nastavenie uhla opierky nôh postupujte nasledovne: Uchyťte rukou podporu nôh, následne druhou rukou potiahnite madlo. Madlo odistite a opatrne nastavte ťahaním alebo odtlačaním podpory nôh. Po nastavení požadovaného uhlu, zaistite madlo do príslušnej medzery medzi zubmi.

Zaistenie polohy podpory

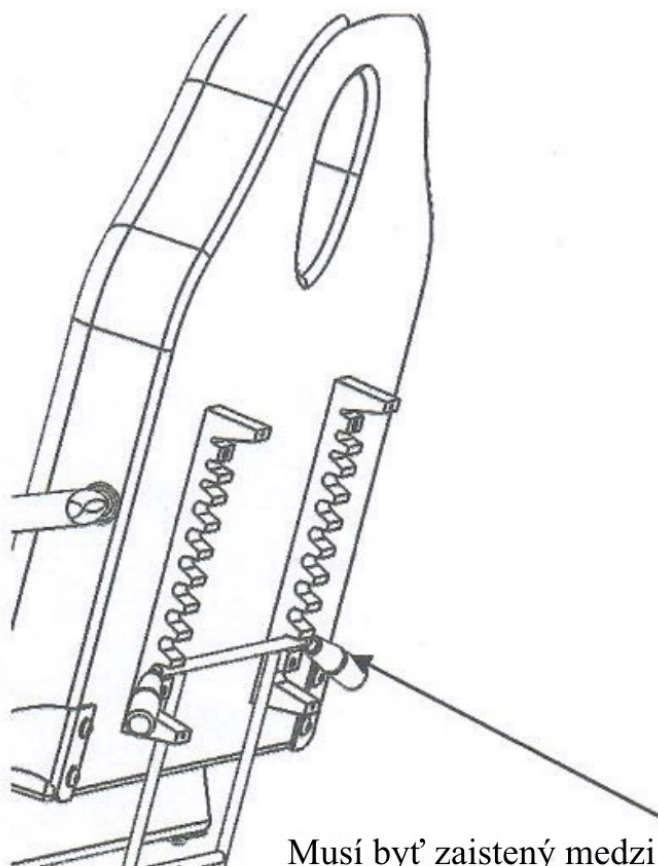

Musí byť zaistený medzi plastovými zubami.

Čistenie a dezinfekcia masážneho lehátka

- Aby ste povrch kresla udržali v dobrom stave, je potrebné ho čistiť pravidelne. Myslite na to, že kreslo musí byť čistené a dezinfikované po každom použití, po každom klientovi. Kompletná dezinfekcia sa dôrazne odporúča raz za mesiac.
- **Kovové a plastové povrchy**
 - Čistite kovové a plastové povrchy a ručné ovládanie s vlhkou handričkou alebo slabou zásaditým čistiacim roztokom. Použite malú kefku v rohoch a na ďalších ťažko dostupných miestach. Po vydezinfikovaní povrch opláchnite vodou a dôkladne kreslo vyutierajte do sucha.
 - Nepoužívajte príliš veľa dezinfekčných tekutín (alkoholový alebo chlórový). Dodržujte inštrukcie výrobcu dezinfekcie. Dezinfekciu nakoniec nechajte pri izbovej teplote odpariť.
- **Nerezové povrchy**
 - Povrch je vysoko chemicky rezistentný. Tento povrch musí byť čistený jemným čistiacim prostriedkom. Amoniak a väčšina rozpúšťadiel poškodí nerezové povrchy. Vyhnite sa používaniu chlórových roztokov, alebo pochrómovaniu na kovové povrchy.
 - Nepoužívajte vodný sprej, sprchu, vysokotlakové vodné zariadenie a nestriekajte žiadnym spôsobom vodu ani iné prípravky na kreslo pri čistení.
 - Nevykonávajte čistenie pri vysokej teplote - nad 40°C a vysokej vlhkosti vzduchu. Nenechávajte zariadenie v prostredí, kde môže byť znečistené nejakou tekutinou.
 - Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá ani kyselinu. Sterilizačnú látku dajte z povrchu preč. Po dezinfekcii prosím vyčistite povrch s čistým mokrým uterákom.
- **Povrch kresla**
 - K utretiu povrchu kresla používajte jemný uterák. Používajte špeciálny čistiaci prípravok na koženku. Prípravok po koženke utierajte rovnomerne. Potom na očistenie použite čistý jemný uterák/utierku. Koženky sa nedotýkajte mokrým oblečením, kyslími alebo zásaditými chemikáliami.
 - Ak dodržíte tieto pokyny, koženka kresla vám bude slúžiť dlhú dobu.

Údržba kresla

- Čítajte inštrukcie pozorne!
- Pre údržbu a servis je potrebný skúsený autorizovaný personál. Údržbu a opravy v neautorizovanom servise alebo vykonané neodbornou osobou môže spôsobiť vážne zranenie alebo poškodenie kresla. Za takéto konanie výrobca ani distribútor nie je zodpovedný.
- Do zariadenia kresla ako i samotného kresla je povolené inštalovať iba originálne diely.
- Je zakázané používať kreslo alebo jeho časti, ak zariadenie alebo jeho časti nepracujú bez problémov. Ak sa vám zdá, že kreslo nepracuje správne, nepoužívajte ho a kontaktujte predajcu.
- Všetky zásahy do zariadenia kresla a tiež údržba musia byť zaznamenané.

Opatrenia na údržbu:

- Raz týždenne skontrolujte stav ovládacích funkcií a zapíšte ich.
- Nasledujúce zariadenia - časti kresla je potrebné skontrolovať najmenej raz za 6 mesiacov:
 - kovania a inštalácia pripevnenia
 - normálna činnosť blokovacieho systému lehátka
- Ak zistíte poškodenie, prosím prestaňte zariadenie / kreslo používať. Kontaktujte ihneď predajcu. Taktiež v prípade, ak zistíte, že zariadenie robí nejaký hluk alebo má poruchu. Iba autorizovaná osoba môže zasahovať do zariadenia.

- Ak zistíte nejaké poškodenie rámu, prosím odstavte zariadenie, a kontaktujte výrobcu / predajcu.
- Zariadenie nepoužívajte, pokiaľ neprebehne autorizovaná oprava.

Návod na zloženie masážneho kresla Basic

Na zloženie kozmetického kresla sú potrebné 2 osoby. Pripravte si deku alebo plachtu, na ktorú si kozmetické kreslo položíte pred skladaním. Montáž vám zaberie približne 20 minút. Nástroje potrebné na zloženie kresla je priložené ku kozmetickému kreslu. Skrutky potrebné na zloženie kresla sa nachádzajú na jednotlivých častiach kresla.

1. Všetky časti vyberte zo škatule a starostlivo rozbalte.
2. Skontrolujte zem, kde budete kreslo skladať, aby sa tam nenachádzali ostré predmety, ktoré by mohli poškodiť koženku kresla. Na skontrolovanú zem si rozprestrite dostatočne veľkú deku či plachtu.
3. Hlavnú časť kresla s koženkou položte na deku tak, že koženka bude otočená smerom dolu.
4. Kreslo sa skladá z troch častí. Na pravej strane stredovej časti sa nachádzajú 2 skrutky zvislo pod sebou, ktoré odskrutkujete pomocou priloženého kľúča. Následne za pomoci druhej osoby priložíte nohy kresla na diery, ktoré vznikli a späť pevne priskrutkujete.
5. Ten istý postup z bodu 4 opakujete na ľavej strane.
6. Vezmite jednu z dvoch dlhých tyčí. Odskrutkujete matice, ktoré sú na tyčiach z jednej aj z druhej strany. Tvarovaný plast necháte na dlhej tyči a za pomoci druhej osoby túto tyč priskrutkujete, najprv z jednou stranou nôh a následne z druhou stranou nôh.
7. Ten istý postup z bodu 6 opakujete s druhou tyčou. Tak vznikne stabilná konštrukcia.
8. Na podperách nôh sa nachádzajú čierne zaistovacie zuby. Na týchto zuboch sa nachádzajú plechy pripevnené krížovými skrutkami. Tieto skrutky odskrutkujete a odstránite plechy.
9. Madlo, ktoré je pripevnené k nohám vložte medzi zuby.
10. Priskrutkujte naspäť oba plechy ku čiernym zubom.
11. Pružinu, ktorá sa nachádza na stredovej časti natiahnite na tyčku, ktorá sa nachádza v strede konštrukcie madla.
12. Tie isté postupy z bodov 8, 9, 10 a 11 opakujte pri skladaní podpery chrbátu.
13. Uistite sa, že všetky skrutky sú dostatočne dotiahnuté.
14. Podložky pod maticami a skrutkami musia byť inštalované tak, aby zabezpečili pevnosť spoju.
15. Za pomoci druhej osoby prevráťte kreslo na nohy.
16. Nasadte opierky na ruky do predpripravených dier na boku kresla.
17. Kreslo je pripravené na používanie.

Pozáručný servis:

REVIXA s.r.o.

Nitra, Golianova 66.

info@revixa.sk

0904 158 489