


Návod - Revixa kozmetické kreslo Lara LA157

Pred použitím si prosím prečítajte inštrukcie k používaniu a údržbe kozmetického kresla.

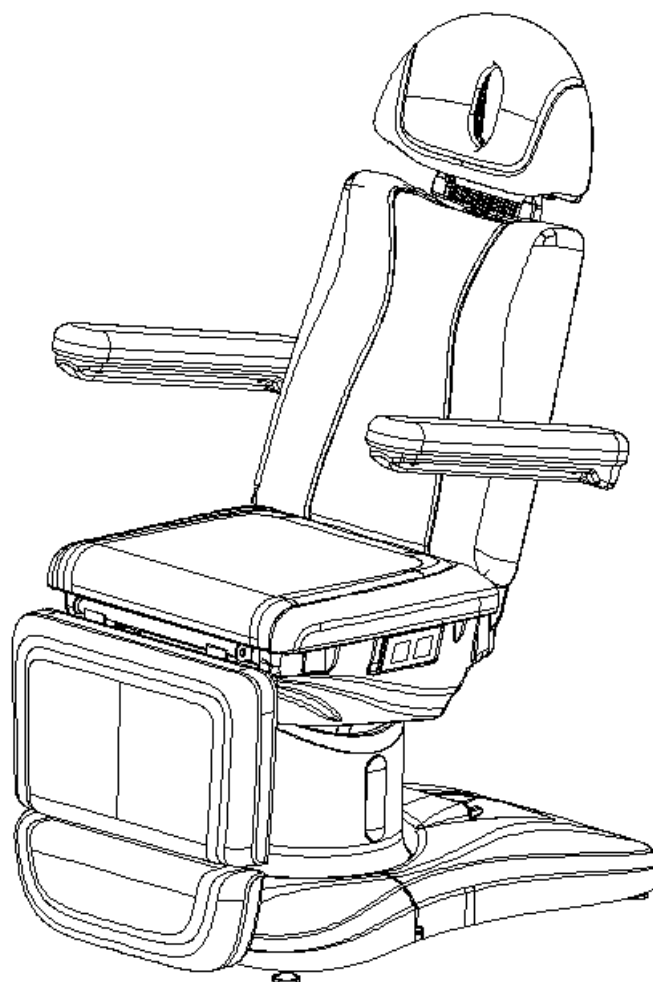


1. Obsah:

- 2. Nosnosť produktu
 - 3. Postup po obdržaní kresla
 - 4. Popis funkcií a častí kresla
 - 5. Varovania a opatrenia
 - 6. Používanie kresla
 - 7. Čistenie a dezinfekcia kresla
 - 8. Údržba kresla
 - 9. Bežné problémy pri používaní
 - 10. Popredajný servis
- Tento návod poskytuje detailné inštrukcie na používanie a údržbu zariadenia. Prosím, oboznámte sa s ním pred používaním kresla. Manuál si odložte pre prípad ďalších používateľov tohto kresla.


2. Nosnosť kresla - 200kg.

- nosnosť opernej časti chrbátu- 50kg
- nosnosť sedacej časti - 200kg
- nosnosť hornej časti podpery na nohy - 25 kg
- nosnosť spodnej časti podpery na nohy - 5 kg
- nosnosť opernej časti na hlavu - 5 kg
- počas zdvíhania masážneho lehátka si naň nesadajte. Zariadenie nepreťažujte, jeho maximálna nosnosť je 200kg. Neskáčte na zariadenie priamo, aby ste nepoškodili konštrukciu

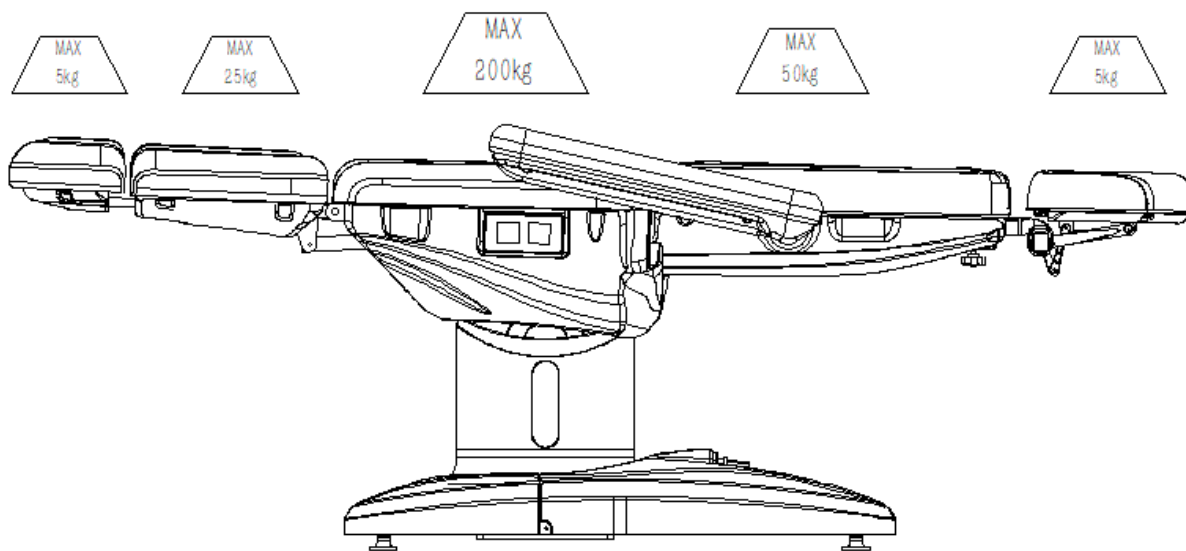

3. Postup po obdržaní kresla


- Kreslo je zabalené v kartónovej krabici z 10-vrstvového papiera, ktorý poskytuje dobrú ochranu pre daný tovar.
- Balenie (kartónovú krabicu) odporúčame odložiť, pre budúce použitie, najmä pre prípadné vrátenie tovaru počas záručnej doby.
- Pre väčšiu ochranu človeka sú potrebné k vybraniu kresla z krabice dvaja ľudia. Pri vyberaní kresla stojí jedna osoba v prednej časti a druhá osoba v zadnej časti kresla. Kreslo sa nesmie zdvíhať na bokoch, vždy sa môže zdvíhať iba za prednú a zadnú časť stola.

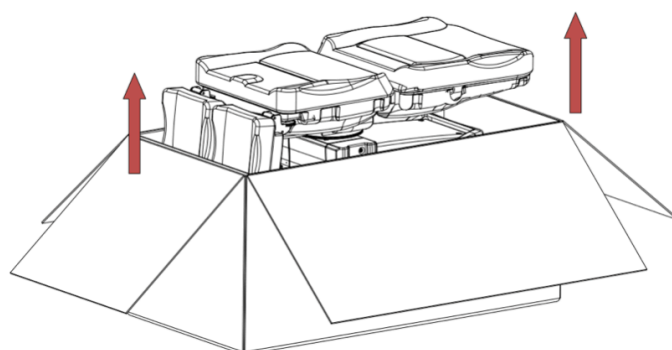

- Pri prevzatí tovaru ho najskôr dôkladne skontrolujte. V prvom rade balenie a následne i kreslo, či neprišlo k poškodeniu. Ak vidíme očividné znaky poškodenia, najneskôr do 24h od prijatia tovaru kontaktujte predajcu.
- Uistite sa, že všetko vybavenie kresla je v čase doručenia kompletne. V prípade, že niektoré časti chýbajú, kontaktujte ihneď predajcu.
- Kreslo používajte v normálnom suchom prostredí, kde je teplota medzi +10°C až +40°C a vlhkosť medzi 30° až 75°. Ak z nejakého dôvodu klesne teplota pod 0°C, nastavte teplotu miestnosti späť na požadovanú prevádzkovú teplotu a počkajte 5 hodín, kým kreslo začnete znovu používať.
- Pred použitím kresla si prečítajte nasledovné inštrukcie:
 - Uistite sa, že všetok obalový materiál je dostatočne odstránený.
 - Uistite sa, že kreslo sa môže pohybovať smerom hore a dole voľne a plynule.
 - Uistite sa, že kreslo je umiestnené tam, kde ho potrebujete mať.
 - Uistite sa, že kreslo je pripojené k vhodnému elektrickému napätiu.
 - Po preprave a prenášaní masážneho lehátka je potrebné nechať lehátko 5h v klude na ustálenie oleju v elektromotoroch.
- **Dôležité!** Deti, alebo nezaučení ľudia nesmú používať kreslo. Deti držte v dostatočnej vzdialenosti od kresla. Pre zvýšenú bezpečnosť, prosím zamknite kreslo a odpojte od elektriny, pokiaľ sa kreslo nepoužíva a nie je pod dohľadom.

4. Popis funkcií a častí kresla Lara LA157

Kreslo je vhodné pre profesionálne terapie, no tiež môže byť používané na široké rozpätie skrášľujúcich procedúr. Je dizajnovaný na pohodlné ležanie a sedenie pri procedúre. Celé kreslo obsahuje štyri hlavné sekcie a pár podpér na ruky. Ručné ovládanie môže byť umiestnené na hák na jednej zo strán sedacej časti. Kreslo je navrhnuté pre osoby staršie ako 12 rokov a výškou nad 146 cm.

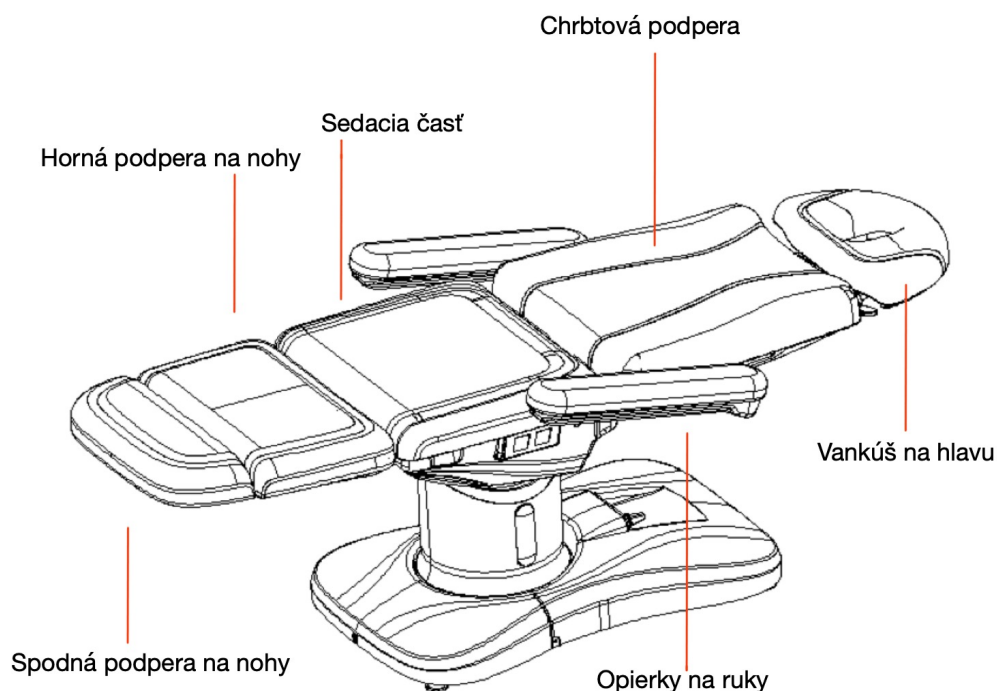


5. Varovania a opatrenia

- Predná časť na chrbát a hlavu a tiež podpery na nohy nemôže byť zaťažovaná plnou váhou dospelého človeka.
 - Neskáčte priamo na kreslo.
 - Nepoužívajte a neumiestňujte kreslo v blízkosti horľavého plynu.
 - Pred zvyšovaním, znižovaním a polohovaním kresla prosím skontrolujte, či sa pod alebo nad kreslom nenachádzajú prekážky.
 - Kreslo nepreťažujte.
 - Uistite sa, že elektrická zásuvka je dosiahnuteľná do 2m.
- **Upozornenie!**
 1. Pre bezpečnosť prosím pripojte elektrické napájanie do zásuvky.
 2. Vyhnite sa ťahaniu napájacieho káblu, kreslo zdvíhate. Napájací kábel k zariadeniu neprivezujte. Prosím uistite sa, že v prípade núdze môže byť napájací kábel jednoducho demontovaný.
 3. Pred pohybovaním s kreslom sa uistite, že napájací kábel je v takej polohe, aby neuviazol medzi časťami kresla.
 4. Ak je napájací kábel poškodený, okamžite ho odpojte a kreslo prestaňte používať. Ihneď kontaktujte predajcu.
 5. Uistite sa, že nezaškolená osoba sa nedotkla ovládacej časti kresla a taktiež, že neprišlo k prípadnej nehode.
 6. Pod kreslo nič neumiestňujte.
 7. Okolo kresla zabezpečte dostatočne potrebného miesta.
 8. V okolí kresla sa vyhnite ostrým predmetom alebo iným škodlivým objektom.
 9. Neupravujte konštrukciu kresla alebo nepridávajte žiadne kovania na produkt.
 10. Kreslo neumiestňujte v blízkosti vchodu alebo schodov.

6. Používanie elektrického kresla



- Umiestnite kolíky elektrického kábla do elektrickej zásuvky s napätím 110V - 240V.
- Pripojte ručný ovládač do prípojky na ovládač, podľa obr. (pozor na kolíky konektora aby ste ich nesprávnou manipuláciou nepoškodili).

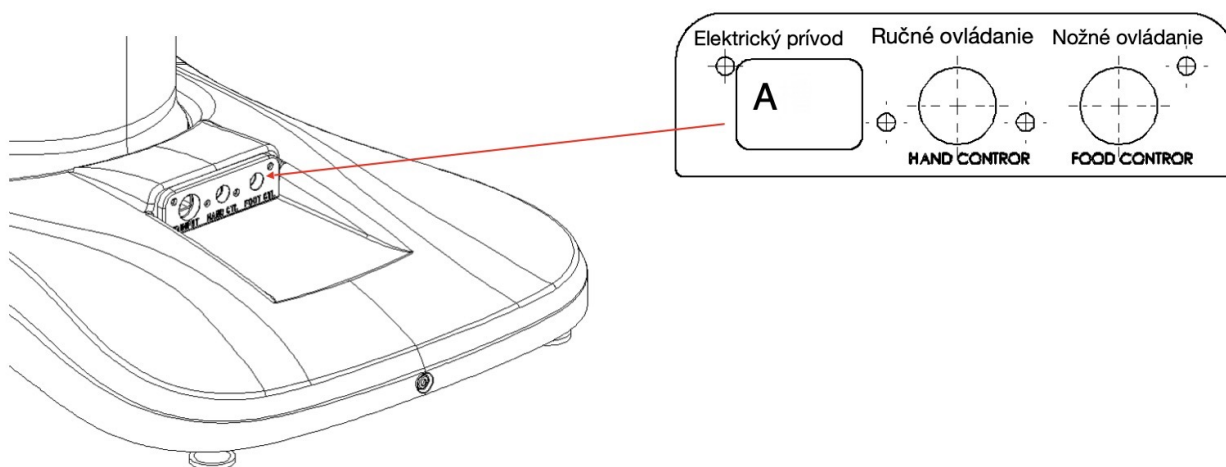

Funkcie ručného ovládania - nastavenie sklonu chrbtovej časti (0 - 75°)

A: Elektrický zdvih operadla hore



B: Elektrický zdvih operadla dole

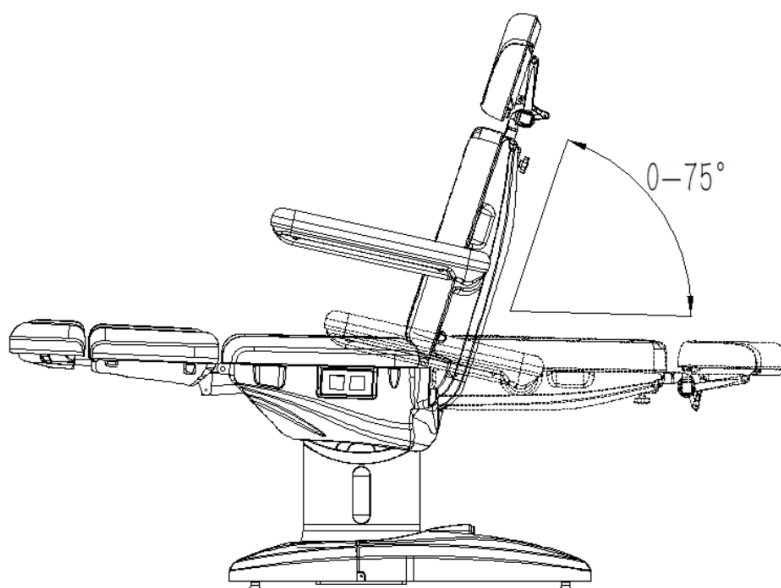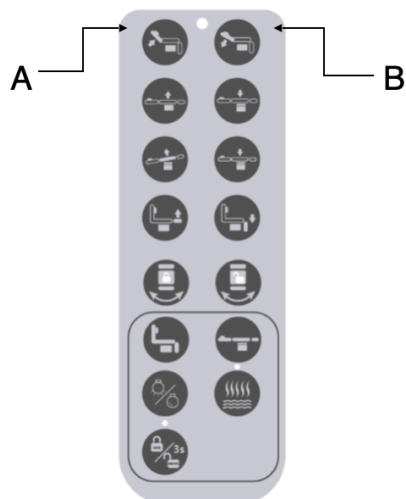

Funkcie ručného ovládania - nastavenie výšky kresla (68 - 90 cm)

C: Elektrický zdvih kresla hore



D: Elektrický zdvih kresla dole

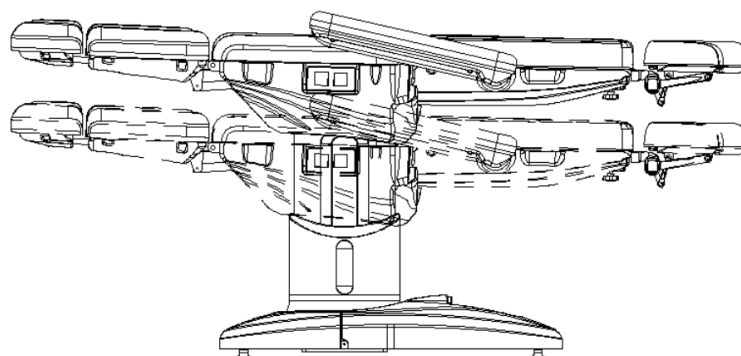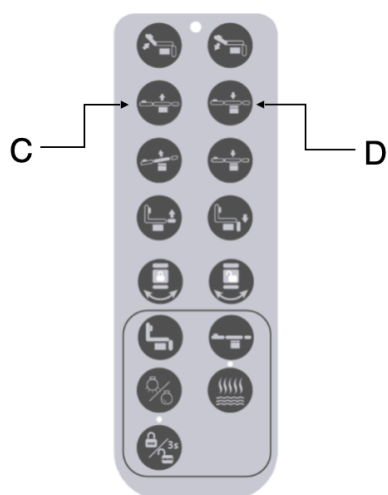

Funkcie ručného ovládania - nastavenie uhlu celého kresla (0 - 10°)

E: Elektrický sklon celého kresla hore



F: Elektrický sklon celého kresla dole

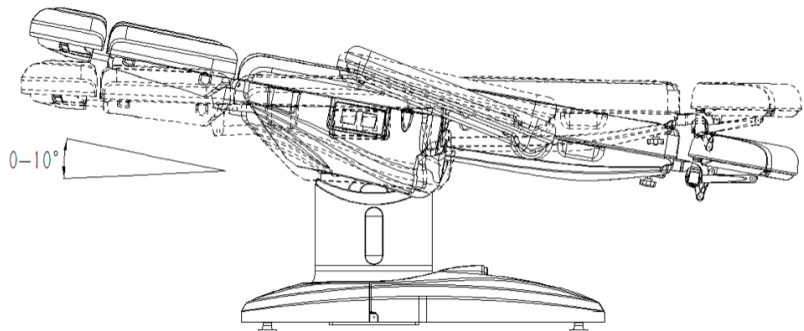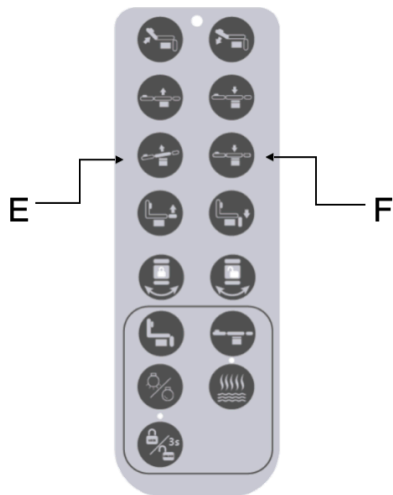

Funkcie ručného ovládania - nastavenie sklonu podpier na nohy (0 - 90°)

G: Elektrický sklon podpier na nohy smer hore



H: Elektrický sklon podpier na nohy smer dole

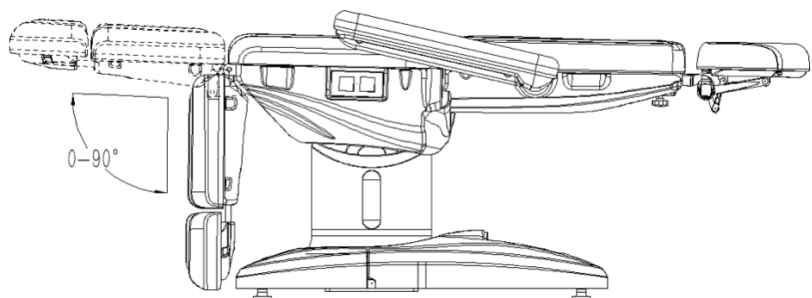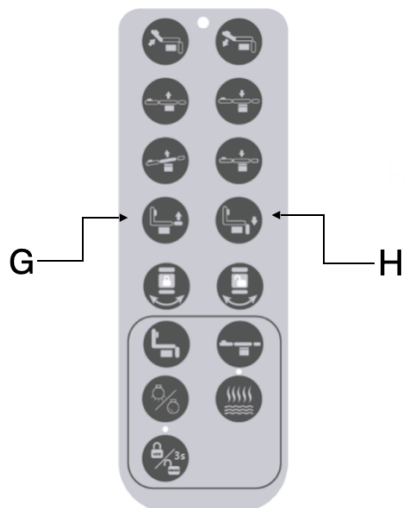

Funkcie ručného ovládania - zaistenie a odystenie možnosti ručného otáčania kresla.
Vďaka tejto funkcii môžete odystíť kreslo a rukou otočiť kreslo do požadovanej strany.
Druhým tlačidlom kreslo zaistíte.



I: Zaistiť kreslo proti otáčaniu (svieti červené svetlo)

J: Odistiť kreslo pre otáčanie (svieti červené svetlo)

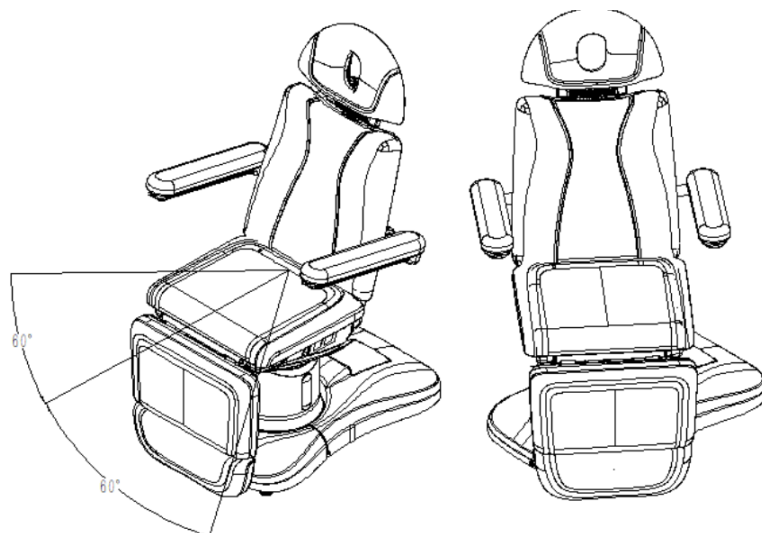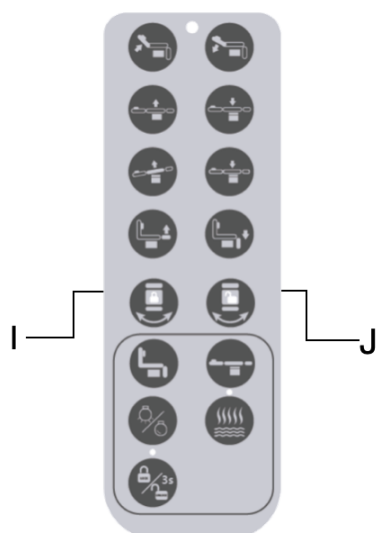


Funkcie ručného ovládania - nastavenie automatickej polohy na sedenie

K: Nastavenie automatickej polohy na sedenie

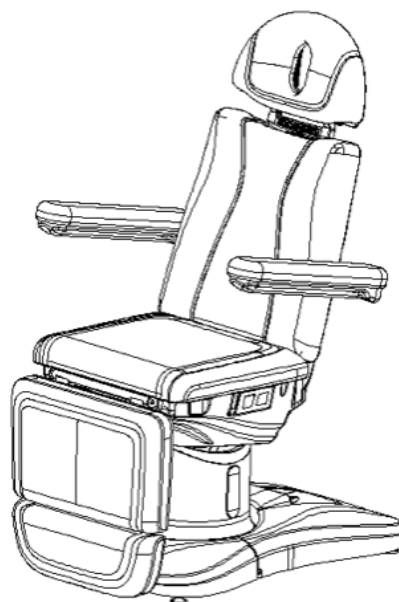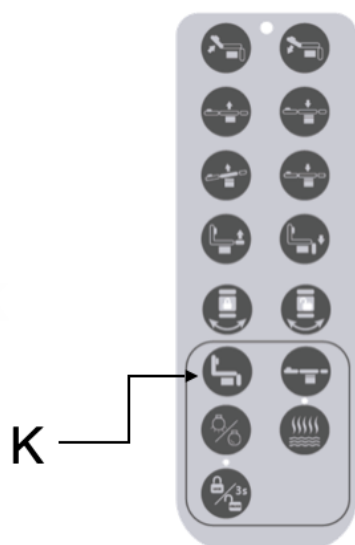

Funkcie ručného ovládania - nastavenie automatickej polohy na ležanie

L: Nastavenie automatickej polohy na ležanie

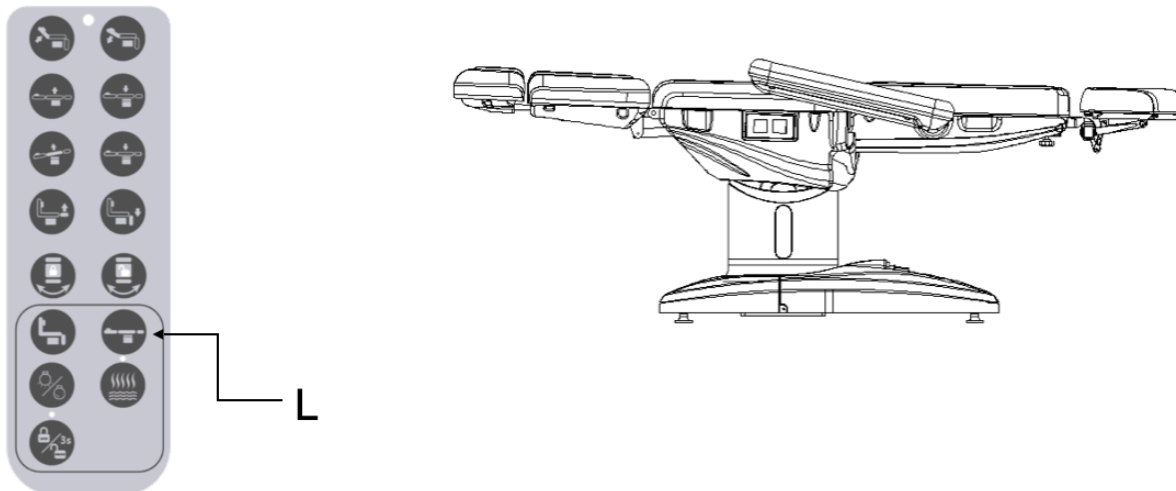


Funkcie ručného ovládania - ďalšie funkcie



M: Zapnutie / vypnutie svetla na kresle

O: Zablokovanie všetkých funkcií kresla (podržíte 3 sekundy na zablokovanie, pri opätovnom podržaní sa funkcie odblokujú)

Tento typ kresla nemá funkciu vyhrievania

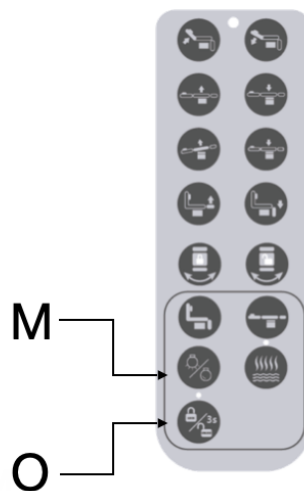




Inštalácia opierok na ruky: Kreslo obdržíte s demontovanými opierkami na ruky. Opierky dáte do kolmej polohy a nasadíte na železné hriadele s výbežkom. Tieto hriadele sa nachádzajú na stranách kresla. Opierky môžete po nainštalovaní polohovať 0 - 180°.

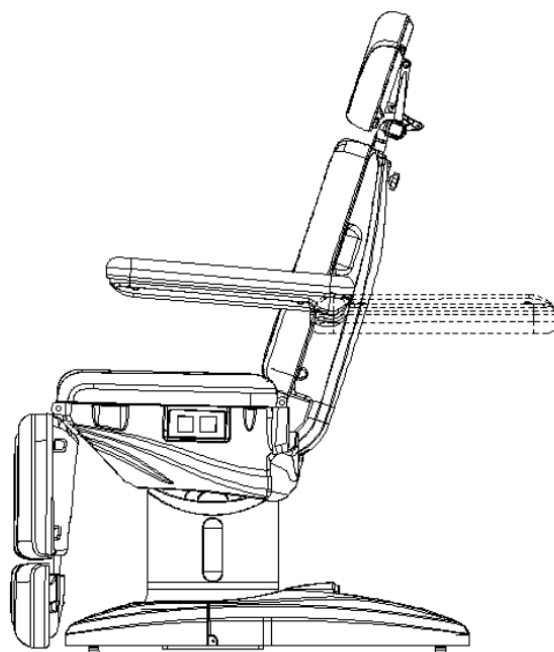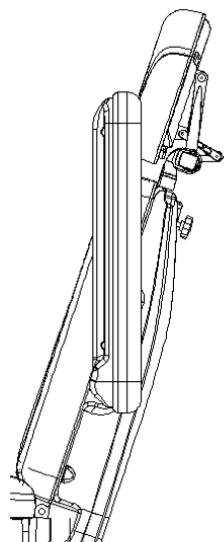

Inštalácia opierky na hlavu: Tyčky na opierke hlavy nastavte vodorovne s opierkou hlavy a zaistíte pomocou madla. Pohybom madla odistíte, alebo opačným pohybom zaistíte.



Nastaviteľný uhol opierky hlavy 0-90 stupňov. Pred nastavovaním uvoľnite madlo a po nastavení madlo zaistíte.

Poznámka: Ak je opierka hlavy uvoľnená a madlo nie je pevne zaistené, zatlačte na jednu stranu opierky pričom pred uzamknutím otočte madlom v smere hodinových ručičiek jeden, alebo dva krát.

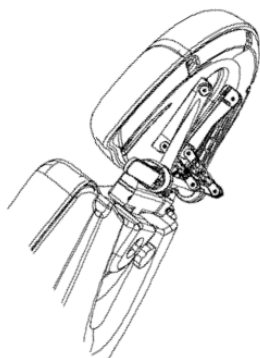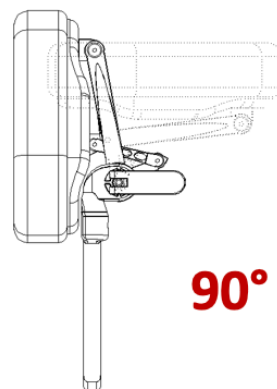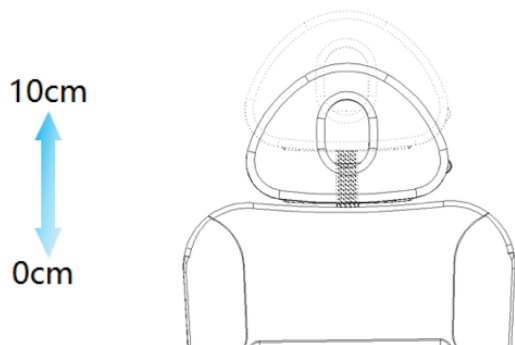

Zamknuté madlo

Odomknuté madlo

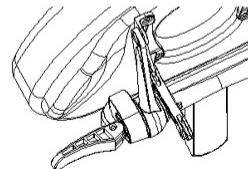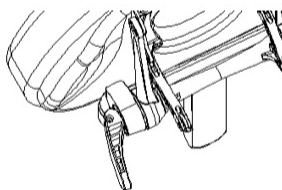

7. Čistenie a dezinfekcia kresla

- Pred čistením a dezinfekciou prosím odpojte napájací kábel.
- Aby ste povrch kresla udržali v dobrom stave, je potrebné ho čistiť pravidelne. Myslite na to, že kreslo musí byť čistené a dezinfikované po každom použití, po každom klientovi. Komplexná dezinfekcia sa dôrazne odporúča raz za mesiac.
- **Kovové a plastové povrchy**
 - Čistite kovové a plastové povrchy a ručné ovládanie s vlhkou handričkou alebo slabou zásaditým čistiacim roztokom. Použite malú kefkú v rohoch a na ďalších ťažko dostupných miestach. Po vydezinfikovaní povrch opláchnite vodou a dôkladne kreslo vyutierajte do sucha.
 - Nepoužívajte príliš veľa dezinfekčných tekutín (alkoholový alebo chlórový). Dodržujte inštrukcie výrobcu dezinfekcie. Dezinfekciu nakoniec nechajte pri izbovej teplote odpariť.
- **Nerezové povrchy**
 - Povrch je vysoko chemicky rezistentný. Tento povrch musí byť čistený jemným čistiacim prostriedkom. Amoniak a väčšina rozpúšťadiel poškodí nerezové povrchy. Vyhnite sa používaniu chlórových roztokov, alebo pochrómovaniu na kovové povrchy. Pred pripojením do elektrickej siete a používaním zariadenia sa uistite, že všetky povrchy sú suché.
 - Nepoužívajte vodný sprej, sprchu, vysokotlakové vodné zariadenie a nestriekajte žiadnym spôsobom vodu ani iné prípravky na masážne lehátko pri čistení.
 - Nevykonávajte čistenie pri vysokej teplote - nad 40°C a vysokej vlhkosti vzduchu. Nenechávajte zariadenie v prostredí, kde môže byť znečistené nejakou tekutinou.
 - Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá ani kyselinu. Sterilizačnú látku dajte z povrchu preč. Po dezinfekcii prosím vyčistite povrch s čistým mokrým uterákom.
- **Povrch kresla**
 - K utretiu povrchu kresla používajte jemný uterák. Používajte špeciálny čistiaci prípravok na koženku. Prípravok po koženke utierajte rovnomerne. Potom na očistite použité čistý jemný uterák/utierku. Koženky sa nedotýkajte mokrým oblečením, kyslími alebo zásaditými chemikáliami.
 - Ak dodržíte tieto pokyny, koženka kresla vám bude slúžiť dlhú dobu.

8. Údržba kresla

- Čítajte inštrukcie pozorne!
- Pre údržbu a servis je potrebný skúsený autorizovaný personál. Údržbu a opravy v neautorizovanom servise alebo vykonané neodbornou osobou môže spôsobiť vážne zranenie alebo poškodenie kresla. Za takéto konanie výrobca ani distribútor nie je zodpovedný.
- Do zariadenia kresla ako i samotného kresla je povolené inštalovať iba originálne diely.
- Je zakázané používať kreslo alebo jeho časti, ak zariadenie alebo jeho časti nepracujú bez problémov. Ak sa vám zdá, že kreslo nepracuje správne, odpojte ho z elektrickej siete, nepoužívajte ho a kontaktujte predajcu.
- Všetky zásahy do zariadenia kresla a tiež údržba musia byť zaznamenané.
- Pred údržbou alebo opravou sa uistite, že zariadenie je vypnuté a odpojené z elektrickej siete.

9. Bežné problémy pro používaní

- **Ručné ovládanie nefunguje**
 - V prvom rade kreslo odpojte z elektrickej siete. Skontrolujte polohu prípojky ručného ovládania k ovládacej skrinke, môže byť povytiahnutá, Prípojku ručného ovládania vytiahnite a vložte späť do zástrčky ručného ovládania. Pamätajte, prípojka ovládanie musí byť v zástrčke ručného ovládania. Skontrolujte, či motor pracuje správne.
- **Elektrický motor nepracuje**
 - V prvom rade kreslo odpojte z elektrickej siete. Odpojte prípojku motora z ovládacej skrinky a prípojku potom pripojte späť.
 - V prípade, že dané inštrukcie nepomohli k správne fungovaniu masážneho lehátka, kontaktujte predajcu. **Majte prosím pripravený model a dátum predaja.**

10. Pozáručný a záručný servis

REVIXA s.r.o.

Nitra, Golianova 66.

info@revixa.sk

0904 158 489