

NÁVOD NA POUŽITIE – MS CLASSIC

Pred použitím masážneho lehátka si dôkladne prečítajte priložený návod na použitie výrobku, pri inštalovaní dodržujte nižšie uvedené postupy.

A) Rozloženie masážneho stola

1. Opatrne odstráňte ochrannú fóliu a vyberte masážny stôl z ochrannej tašky.
2. Odomknite bočné pracky, ktorými sú spojené obe pohyblivé časti stola. Roztiahnite obidve časti stola, až kým nebudete vedieť otvoriť nohy a vyberte príslušenstvo.
3. Masážny stôl môžete postaviť v prípade, že **nohy sú rovné a lanká nikde nie sú zaseknuté**.
4. Stôl postavte na rovnú plochu a dbajte na to, aby nohy mali nastavenú rovnakú výšku.
5. Ak si lehátko chcete postaviť bez pomoci, lehátko postavte na bočnú stranu tak, aby rukoväť stola bola hore a vyrovnajte nohy stola. Chyťte rukoväť stola, oprite sa jednou nohou o bližšiu nohu stola a jedným razantným pohybom postavte stôl na nohy.

Pri rozložení a používaní masážneho stola sa vyhýbajte kontaktu ostrých predmetov. Pri prenášaní a skladovaní výrobku používajte tašku, aby ste tak predišli predčasnému opotrebeniu výrobku a chránili stôl pred znečistením a poškodením. Používaním tašky zabezpečíte dlhú životnosť výrobku.

B) Skladanie masážneho stola

1. Masážny stôl poskladajte až v prípade, že na ňom klient neleží.
2. Pri skladaní stôl otočte na bok, kde sú umiestnené umelohmotné časti stola.
3. Po uvoľnení laniek a pokrčení nôh začnite dve pohyblivé časti stola približovať k sebe. Dbajte na umiestnenie laniek.
4. Skladanie stola bude jednoduchšie, ak oblúk laniek nebude smerovať do vnútra stola, ale smerom von.
5. Poskladajte obidve pohyblivé časti stola a zamknite pracky. Stôl môžete jednoducho dať naspäť do ochrannej tašky.

C) Prenášanie masážneho stola

Na uľahčenie prenášania stola Vám pribalíme aj praktickú tašku. Stôl môžete prenášať aj pomocou ramennému popruhu tašky. Bočná rukoväť tašky ale neslúži na prenášanie, pomáha len pri navigácii stola v prípade, keď stôl prenášate pomocou ramennému popruhu.

D) Nastavenie výšky stola

Správna výška závisí od výšky (postavy) manipulátora a od typu ošetrovania. Aj keď je výška, ktorá bola nastavená výrobcom správna, prekontrolujte stôl a zatahnite skrutky, ktoré sa mohli vplyvom dopravy a manipulácie uvoľniť. Uistite sa, že všetky nohy stola sú v rovnakej výške.

E) Čistenie a údržba

Na nohy dreveného stola je nanosená vrstva laku, ktorú sa odporúča aspoň každé 3 mesiace ošetriť prípravkom na ošetrovanie dreva. Pri týchto masážnych stoloch sa vyhýbajte vysokým

teplotám, vode a pare. Vysoké teplotné výkyvy tiež môžu poškodiť stôl. V prípade, že sa stôl dostal do styku s vodou, čo najskôr utrite túto časť do sucha.

F) Pred použitím prečítajte a dodržujte nasledujúce pokyny

- **Pri rozložení a skladaní stola dbajte na to, aby lanká boli na správnom mieste;** ak niektoré z nich sú zaseknuté, neťahajte ich; po ich zarovnaní stôl budete môcť jednoducho otvoriť, či poskladať.
- **Masérsky stôl sa nedá poskladať, ak opierky rúk a hlavy nie sú správne uložené –** opierky vytláčajú nohy. Príslušenstvo posuňte a skúste stôl znovu poskladať. Stôl nebudete môcť poskladať ani v prípade, ak lanká nebudú na správnom mieste. Preto ich skontrolujte a pokúste sa znovu poskladať stôl.
- Ak neviete upevniť pracky, pravdepodobne nastala niektorá z hore uvedených situácií, preto prejdite krok za krokom návod ako poskladať masážny stôl. Pri skladaní ani rozkladaní stola nepoužívajte silu. **Poťah chráňte pred ostrými predmetmi (napr. nožnice, ihly, kľúče, prstene), môžu poškodiť a roztrhnúť poťah.**
- Poťah nevystavujte vysokým teplotám, priamemu slnečnému žiareniu, pretože môže stratiť farbu.
- **Drevené časti masážneho stola nevystavujte vysokým teplotám a vode, môže dôjsť k ich deformovaniu.**
- Na masérsky stôl sa nastupuje z boku, v mieste, kde sa dve pohyblivé časti dotýkajú – najprv si sadnite a postupne si môžete ľahnúť. Ak si na stôl nesprávne líhate, môže dôjsť k jeho poškodeniu. **Nemôžete naskočiť, kľaknúť či nastúpiť opieraním sa o lakety, pretože vyviniete príliš veľký tlak v jednom bode a môže dôjsť k poškodeniu stola.** Výrobcom povolenú záťaž neprekročíte, ak stôl zaťažíte rovnomerne.
- Na masérsky stôl v častiach kde sú **otvory na zasunutie postranných opierok a v časti, kde sa nachádza otvor na hlavu, prípadne je uzavretý zátkou, sa nesmiete zapierať s dôvodu oslabenia stola v týchto častiach.**
- **Masérsky stôl je konštruovaný na jednu osobu.** Na stole nemôže byť viacero osôb ani v prípade, že ich spoločná hmotnosť je menšia než uvedená nosnosť stola.
- Na skladací stôl **treba správne nasadnúť a zosadnúť.** Ak na to nebudete dbať a nedodržíte hore uvedené pokyny, môže dôjsť k poškodeniu vyplývajúcu z nesprávneho použitia. V takomto prípade nemôžete uplatniť záruku na výrobok.
- Nečistotu, prach, olej treba utrieť vlažnou vodou obsahujúcou prací prostriedok. **Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce alkohol či iné silné dezinfekčné prostriedky, lebo môže dôjsť ku rozpadnutiu, prípadne poškodeniu poťahu.** K dezinfekcii používajte výlučne dezinfekčný roztok na báze izopropanolu, ktorý je určený na polyuretán-vinyl.
- **Pravidelne skontrolujte upevnenia skrutiek** (môžete tým predísť vŕzganiu stola); uistite sa, že všetky súčasti sú na svojom mieste v pôvodnom a nepoškodenom stave. Nesprávne udržiavané stoly môžu spôsobiť zranenie.
- **Masážny stôl nepreťažujte,** dodržte všetky pokyny správneho použitia, inak môže dôjsť k poškodeniu stola i zraneniu používateľa.

G) Používanie príslušenstva pre masážny stôl

- **Podhlavník** v tvare U pripevnite na držiak pomocou suchého zipsu. Držiak vložte do otvorov na konci stola, pri otvore na tvár (hlavu). Pri tejto činnosti uvoľnite rýchlopínak vytiahnutím doprava (smerom od držiaka). Nastavte želanú výšku podhlavníka a upevnite ju pritlačením rýchlopínaka doľava (smerom k držiaku). Ak je držiak podhlavníka labilný, vytiahnite ju z otvorov, uvoľnite rýchlopínak a začnite ňou krúžiť okolo vlastnej osi. Vplyvom tejto činnosti sa zosilní fixácia držiaka. Pokiaľ pri krúžení rýchlopínakom cítite, že sa os pohybuje, tak ju musíte skrutkovačom zatahnúť na druhej strane.
- **Podložka pod ramená** slúži na zväčšenie šírky stola, a tým zabezpečuje väčšie pohodlie pre klienta. Podložku pod ramená vložte do otvorov umiestnených na bokoch stola. Samozrejme stôl môžete používať aj bez príslušenstva.
- Príslušenstvo ako podhlavník tvaru U, podložka pod ramená, operadlo na lakte slúžia výlučne len na podporu pohodlia klienta, vyvinúť tlak na tieto príslušenstvá je zakázané.

Parametre masážneho stola CLASSIC:

Váha s príslušenstvom – 15,50kg

Váha bez príslušenstva – 13,00kg

Dĺžka stola s podhlavníkom – 215,00cm

Dĺžka stola bez podhlavníka – 185,00cm

Šírka stola s prídavnými opierkami na ruky – 92,00cm

Šírka stola bez opierok na ruky – 70,00cm

Pracovná nosnosť stola – 200,00kg

Výška stola – 89cm – 63cm


Nastaviteľnosť výšky nôh - po 3,50cm

Nosnosť dynamická – je nosnosť pri ktorej sa masážny stôl zaťaží určitou hmotnosťou a cyklicky sa zaťažuje testovacím zariadením priečne ale aj pozdĺžne. Pri skúške sa dosahuje niekoľkých tisícov opakovaní, ktoré symulujú prácu maséra počas niekoľko ročného používania masážneho stola. Dynamická nosnosť v kg je hodnota, ktorou sa stôl pri testovaní zaťažuje a nedôjde pri ňom k poručeniu stola.

Nosnosť statická – je nosnosť pri ktorej sa masážny stôl zaťaží určitou hmotnosťou a ponechá sa v pokojnom zaťaženom stave niekoľko hodín. Statická hmotnosť v kg je hodnota, ktorou sa stôl pri testovaní zaťažuje a nedôjde pri ňom k poškodeniu konštrukcie stola.

Pri nedodržaní pokynov a odporúčaní v tomto návode sa stôl môže poškodiť, dokonca aj zlomiť. V takomto prípade sa záruka nevzťahuje na stôl. Vyvíjať tlak na stôl opieraním laktí či kolien je zakázané a záruka sa nevzťahuje na škody vzniknuté touto činnosťou. Preťažovať stôl je nebezpečné a zakázané. Udaná nosnosť stola je daná hmotnosťou zákazníka a silou, ktorá sa naňho vyvinie pri manipulácii.

Návod pre nastavenie podhlavníku.

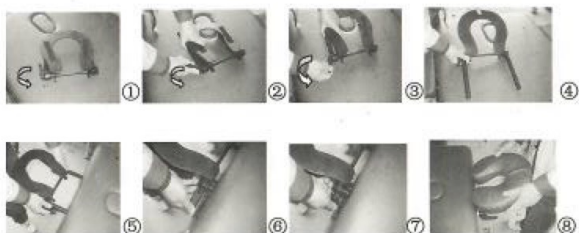

1. Držte v ruke podhlavník a druhou rukou uvoľnite rýchlopínak obr.(1,2,3). Potom vyrovnajte obe trubice obr.(4).
2. Vložte podhlavník do dier masážneho stolu obr.(5).
3. Nastavte podhlavník do polohy pre Vás pohodlnej obr.(6). Potom utiahnite rýchlopínak obr.(7).
4. Opatrne priložte vankúš podhlavníku Na suchý zips a pritlačte ako na Obr.(8). Teraz je podhlavník pripravený.


Dvojdielny masážny Stôl Classic.



Gratulujeme Vám k zakúpeniu masážneho stolu Classic. Váš nový masážny stôl je kvalitne vyrobený podľa štandardov a tiež pozostáva z kvalitných komponentov. Pri správnom a bezpečnom používaní Vám bude masážny stôl slúžiť dlhú dobu.

Bezpečnostné pokyny.


1. Pravidelne kontrolujte masážny stôl. Uistite sa že všetky skrutky sú správnej pritiažené, všetky lanká a drevené časti stolu nie sú poškodené.
2. Nepretáčajte masážny stôl. Pracovná maximálna záťaž je 250kg. Pri preťažení Môže prísť k zraneniu užívateľa.
3. Nenechávajte deti bez dozoru pri masážnom stole. Pri používaní masážneho stolu nesmie byť žiadna osoba ani časť tela pod masážnym stolom.

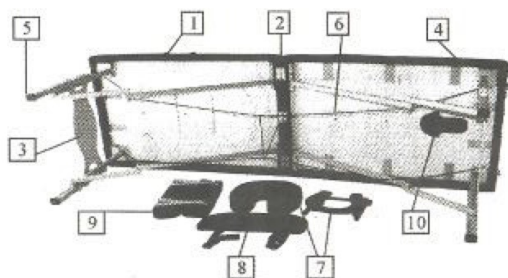

- 1-madlo 2-malé štupele 3-koncová doska
4-bočné otvory 5-gumové spodky 6-ocelové lanko
7-podhlavník a vankúš 8-operadlo
9-bočné operadlá 10-diera v stole na tvár

Rozloženie masážneho stola.

Kroky na rozloženie masážneho stola.

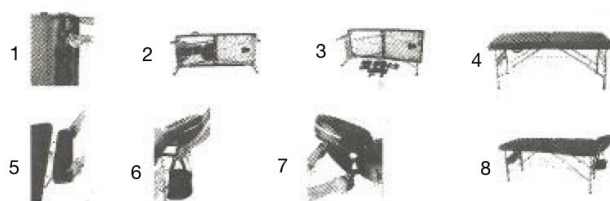

1. Uvoľnite pracky obe pracky.
 2. Postavte stôl na bočnú stranu kde sa nachádzajú plastové štupele.
 3. Vyberte všetko príslušenstvo z popruhov.
 4. Postavte stôl na nohy a uistite sa že je stôl rovno a lanká sú napnuté.
 5. Vložte bočné operadlá do otvorov.
 6. Upevnite prednú podperu pomocou popruhov na podhlavník.
 7. Nastavte si podhlavník do pohodlnej polohy.
 8. Nastavte si výšku masážneho stola pomocou plastových skrutiek.
- Dbajte aby boli všetky nohy v rovnakej výške a skrutky dotiahnuté, inak môže prísť k poškodeniu a zraneniu užívateľa.