

Návod na použitie masážneho lehátka Salony ST10

Výhradný distribútor značky REVIXA:

REVIXA s.r.o., IČO: 50699431, DIČ: 2120430026, IČ DPH: SK2120430026

Adresa: Golianova 66 Nitra ,mob.č.: +421 904 158 489,

Email: info@revixa.sk, Web: www.revixa.sk, www.eshop-masaze.sk,
www.eshop-masaze.cz



Tento návod poskytuje detailné inštrukcie na používanie a údržbu zariadenia. Oboznámte sa s ním pred používaním masážneho lehátka. Návod si odložte pre prípadných ďalších používateľov masážneho lehátka Salony.

Nosnosť masážneho lehátka - 250 kg

- Celková nosnosť lehátka s klientom, príslušenstvom aj vyvinutým tlakom pri terpii je celkom 250 kg.
- Lehátko nepreťažujte za žiadnych okolností, môže prísť k poškodeniu lehátka a zraneniu osoby.
- Je zakázané na masážne lehátko skákať.

Postup po obdržaní masážneho lehátka

- Masážne lehátko je zabalené v kartónovej krabici z 8-vrstvového papiera, ktorý poskytuje dobrú ochranu pre daný tovar.
- Balenie (kartónovú krabicu) odporúčame odložiť, pre budúce použitie, najmä pre prípadné vrátenie tovaru počas záručnej doby.

Bezpečnostné opatrenia

- Pred použitím skontrolujte všetky spojové časti masážneho lehátka. Pri zistení poškodenia nás ihneď kontaktujte (môže prísť k poškodeniu lehátka, alebo k ublíženiu na zdraví).
- Nevytvárajte žiadne zásahy, alebo neinštalujte žiadne iné časti k lehátku, ktoré nie sú súčasťou lehátka.

Dôležité upozornenia

- Nesprávne používanie masážneho lehátka môže viesť k zraneniu osôb a poškodeniu masážneho lehátka.
- Skontrolujte čalúnenie masážneho lehátka, či neprišlo k poškodeniu. Akékoľvek poškodenie nám nahláste. Záruka sa nevšahuje na poškodenie čalúnenia pri nesprávnom používaní, skladaní, rozkladaní a používaní masážneho lehátka na iné účely než je určené.
- Pred každým použitím skontrolujte všetky spojované časti, či sú dostatočne dotiahnuté, skontrolujte či je lehátko správne rozložené na rovnej podlahe. Inak môže prísť k zraneniu osôb a poškodeniu masážneho lehátka.
- Nezaťažujte nadmerne podhlavník a iné časti lehátka.
- Nevystavujte lehátko extrémnym teplotám a vlhkosti.
- Zabezpečte, aby sa k masážnemu lehátku nedostali deti a zvieratá.

Ako sa starať a udržiavať vaše masážne lehátko


Povrch masážneho lehátka

- K utretiu povrchu masážneho lehátka používajte jemný uterák. Používajte špeciálny čistiaci prípravok na koženku. Prípravok po koženke utierajte rovnomerne. Potom na očistenie použite čistý jemný uterák/utierku. Koženky sa nedotýkajte mokrým oblečením, kyslými alebo zásaditými chemikáliami.
- Ak dodržíte tieto pokyny, koženka masážneho lehátka vám bude slúžiť dlhú dobu.
- Neutierajte lehátko alkoholom. Alkohol vysušuje koženku a môže prísť k popraskaniu.
- Aby ste povrch masážneho lehátka udržali v dobrom stave, je potrebné ho čistiť pravidelne. Myslite na to, že masážne lehátko musí byť čistené a dezinfikované po každom použití, po každom klientovi. Kompletná dezinfekcia sa dôrazne odporúča raz za mesiac.

- Pri používaní sa odporúča prekryť lehátko ochrannou plachtou.

Zloženie masážneho lehátka

- Pred skladaním masážneho lehátka si skontrolujte, či balenie obsahuje všetky diely a náradie potrebné na zloženie. Balenie môže obsahovať aj diely navyše. Vyberte všetky časti lahátka z krabice.

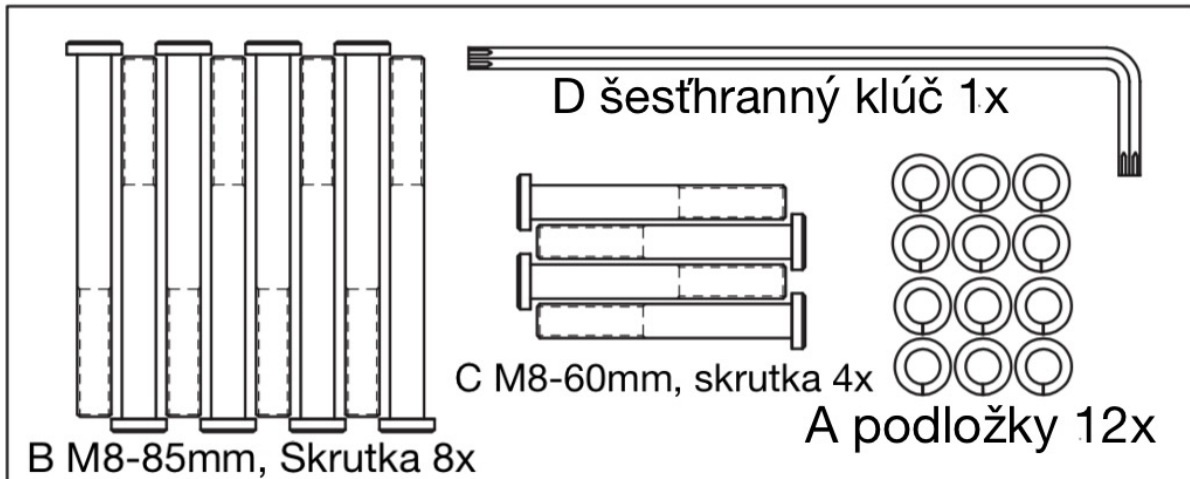


- A: podložky 12 kusov
 B: skrutka M8-85mm 8 kusov
 C: skrutka M8-60mm kusy
 D: šesťhranný kľúč 1 kus

Bod 1.

Presvedčte sa, že na zemi sa nenachádzajú žiadne predmety, ktoré by mohli poškodiť čalúnenie. Na zem položte hrubšiu deku, alebo prikrývku, na ktorú položíte lehátko. Predídete poškodeniu, alebo znečisteniu lehátka. Lehátko položte čalúnením na prikrývku / zem (Obrázok 1).


Bod 2.

Pred montážou nôh na masážne lehátko sa uistite, že tvar nohy je rovnaký ako je tvar podložky na lehátku (Obrázok 2).

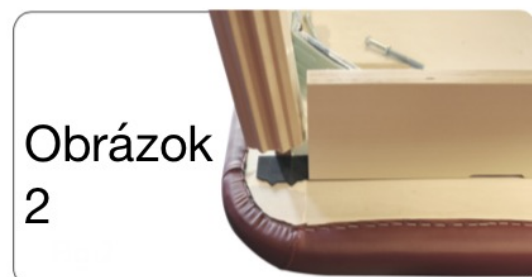


Bod 3.

Nohy masážneho lehátka priskrutkujte podľa obrázka. Na každú nohu idú dve skrutky. Pri každej skrutke použite aj podložku. Na zaskrutkovanie budete potrebovať použiť šesťhranný kľúč (Obrázok 1).

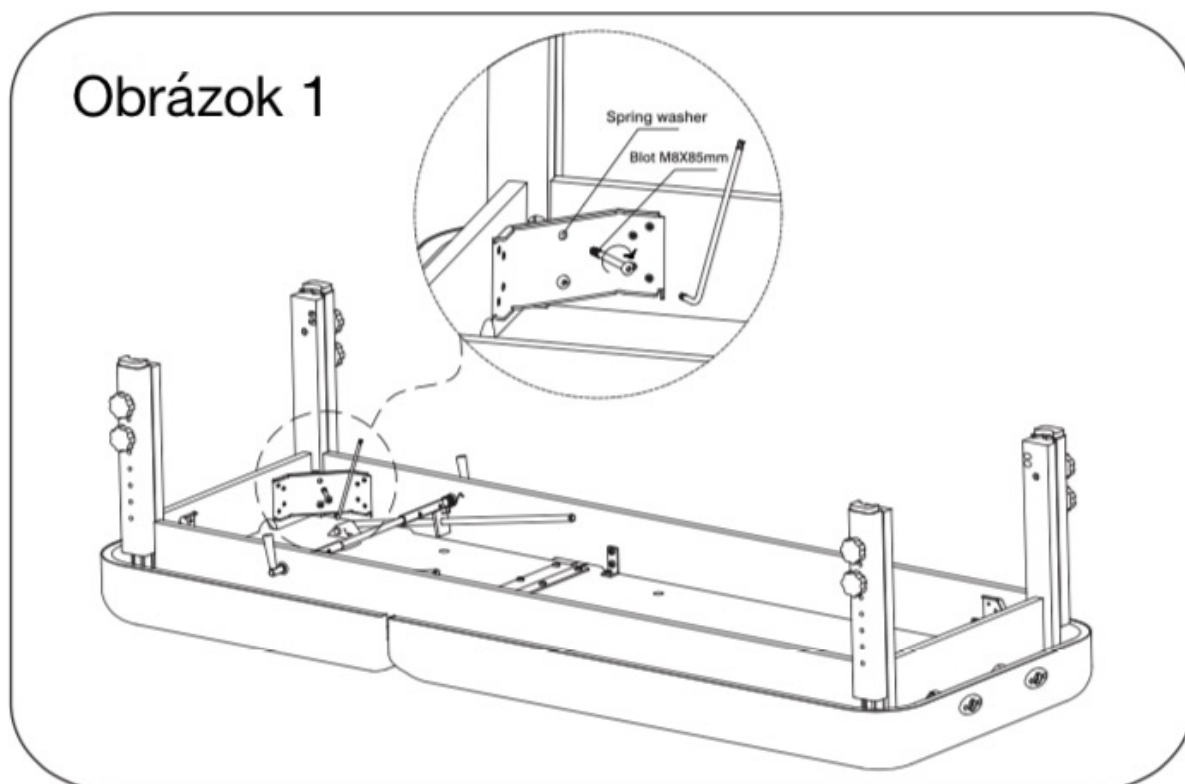

Bod 4.

Policu priložte k nohám masážneho lehátka (je potrebná pomoc druhej osoby). Skontrolujte, že plochá časť police bez predelov smeruje k masážnemu lehátku a podľa obrázka ju priskrutkujte. Pod každú skrutku použite podložku (Obrázok 2).

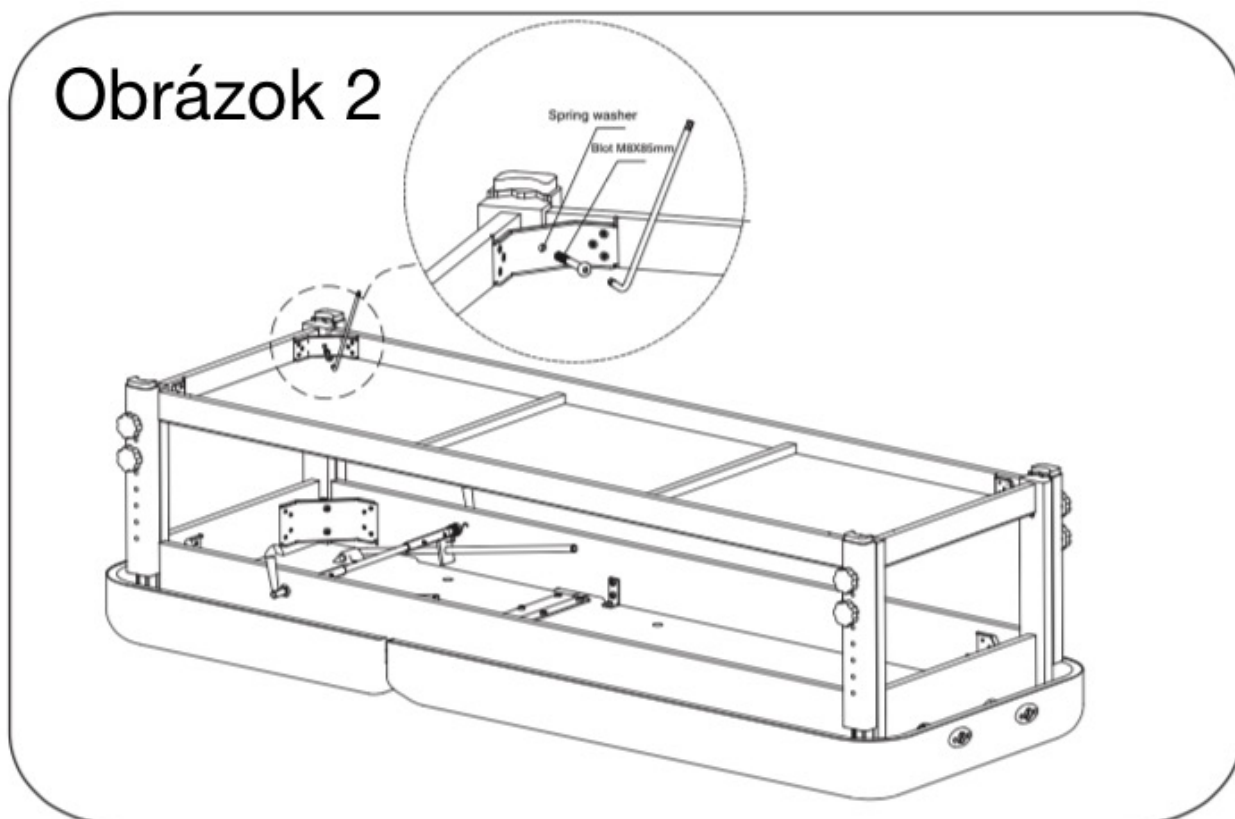**Bod 5.**

Masážne lehátko otočte na nohy lehátka a skontrolujte dotiahnutie všetkých spojov a lehátko odskúšajte.

Nastavenie výšky masážneho lehátka

Na každej nohe lahátka sa nachádzajú dve skrutky. Tieto skrutky odskrutkujte, časť nohy vyberte a nastavte požadovanú výšku lehátka. Potom skrutky späť zatiehnite (Obrázok).



-Záruka na masážne lehátko

-Záruka na masážne lehátko sa vstahuje iba ak sa lehátko používa v súlade s návodom.

-Záruka na konštrukciu je 3 roky, záruka na koženku je 2 roky.

Pozáručný servis:

REVIXA s.r.o.

Nitra, Golianova 66.

info@revixa.sk

0904 158 489



Ďakujeme, že ste si zakúpili náš výrobok a veríme, že budete dlhou dobu spokojný s kvalitou daného výrobku.