

Návod na obsluhu

Masážna stolička Profesional.

Pred použitím masážnej stoličky si dôkladne prečítajte priložený návod na použitie výrobku, pri inštalovaní dodržujte nižšie uvedené postupy!

Masážnu stoličku nepreťažujte maximálna nosnosť je 200kg.

Masážnu stoličku používajte len ak je správne rozložená.

Masážna stolička Vám bude dodaná v čiastočne roloženom stave.

Obsah balenia:

- 1- masážna stolička konštrukcia
- 2- sedadlo
- 3- hydraulický piest
- 4- opierka na ruky
- 5- polohovateľný podhlavník s vankúšom
- 6- polohovateľný podhlavník s vankúšom
- 7- 2 krát kľúč na montáž stoličky

1. Vyberte hlavnú časť masážnej stoličky a rozložte ju do rozloženej polohy. Obrázok č.1




Obrázok č.1

2. Uvoľnite skrutku pre nastavenie výšky podhlavníka. Skrutku uvoľnite tak, aby ste mohli vložiť podhlavník do otvoru na masážnej stoličke a skrutku zatiahnite. Obrázok č.2, Obrázok č.3.



3. Podperu rúk namontujete pomocou skrutiek ktoré sú v podpere rúk zaskrutkované Obrázok č.4. Tieto skrutky musíte uvoľniť a umiestniť na určené miesto Obrázok č.5. Podperu rúk dotiahnite pomocou priloženého imbusového kľúču.

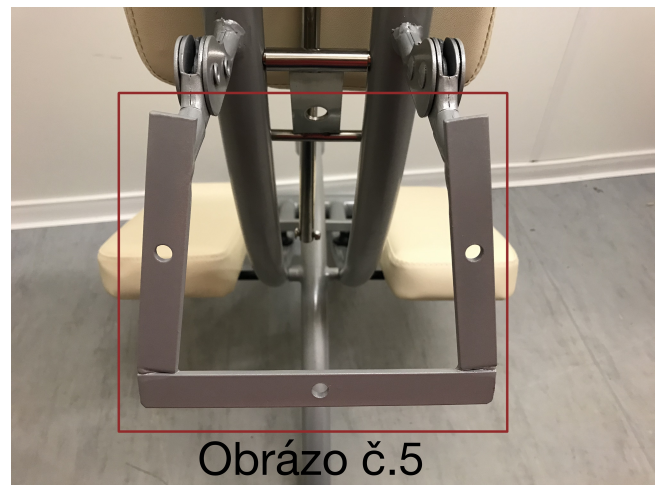

4. Pedperu na hrudník nainštalujete tak že pomocou priloženého vydlicového kľúču a imbusového kľúču odskrutkujete z tyčky. Potom tyčku vložíte do diery znázornenú na Obrázku č.6.



5. Tenšiu časť piestu vložíte do sedadla a hrubšiu časť do konštrukcie masáže stoličky Obrázok č.7 a Obrázok č.8. Potom sedačku zaťažíte vlastnou váhou. Sadnite si na sedadlo opatrne. Pamätajte, že piest musí byť vložený do otvorov rovno Obrázok č.9



6. Masážna stolička je zložená.

Nastavenie polohovateľných častí masážnej stoličky.

-Nastavenie výšky podhlavníka: uvoľníte skrutku (čierna koliesko) na hornej časti masážnej stoličky nastavíte požadovanú výšku podhlavníka a skrutku zatiahnete primeranou silou.

-Nastavenie uhlu podhlavníka: uhol podhlavníku sa nastavujú v niekoľkých bodoch. Cvaknutie mechanizmu signalizuje pevné zachytenie podhlavníku. Podhlavník uvoľníte ďalším ťahaním smerom nahor.

-Nastavenie uhlu podpery rúk: uhol podpery rúk sa nastavuje v niekoľkých bodoch. Cvaknutie mechanizmu signalizuje pevné zachytenie podpery rúk. Podperu rúk uvoľníte ťahaním smerom nahor.

-Nastavenie podpery hrudníka: potiahnutím mechanizmu v ktorom sa nachádza tyčka uvoľníte podperu a nastavíte si požadovaný uhol. Pustením mechanizmu sa podpera zaistí. Dbajte na to, aby tyčka aj diera v mechanizme nebola masťná, alebo špinavá inak môže mechanizmus preklzovať a nebude zaistený.

Nastavenie sedadla: výšku sedadla nastavujete pomocou páčky. Potiahnutím páčky nahor sa nezaťažená sedačka zdvihne, pri zaťažení sa výška zníži. Uvoľnením páčky sa výška sedadla zaistí.

Čistenie a údržba masážnej stoličky:

- K čisteniu masážnej stoličky používajte len také čistiace prostriedky, ktoré sú určené na čistenie syntetickej kože.
- Masážna stolička sa môže čistiť vodou.

Maximálna nosnosť stoličky je 200 kg. Je potrebné, aby ste masážnu stoličku pravidelne kontrolovali či neprichádza k praskaniu prípadnému ohnutiu z niektorých častí masážnej stoličky. V prípade že sa tak deje navštívte autorizovaný servis. V prípade akýchkoľvek závad kontaktujte predajcu alebo certifikovaný servis.

Bezpečnostné pokyny:

- Používať a obsluhovať prístroj nesmú deti.
- Nepreťažovať povolenú max. hranicu zaťaženia - 200 kg.
- Ak sa pri masážnej stoličke nachádzajú deti je potrebné, aby boli pod nepretržitým dohľadom dospelých osôb.
- Pri nastavovaní výšky a pri procedúre sa nesmú pod klientom nachádzať žiadne osoby ani ich časti tela.
- Pre trvalú radosť s vašou masážnou stoličkou čistite kožený povrch pravidelne. Znečistenie olejom, tukom a atramentom musí byť ihneď odstránené. Čistite teplou mydlovou vodou a handričkou z mikrovlákna, alebo mäkkou kefkou na ruky.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá, chloridy, abrazíva, chemické čistiace prostriedky alebo voskové leštidlá.
- Dezinfekciu častí docielite dezinfekčným prípravkom INCIDIN LIQUID.

Upozornenie: na zafarbenie od jeansov alebo iných textílií sa nevzťahuje reklamácia.

Záruka a podmienky záruky:

Poskytovatelia (zdravotnej starostlivosti) sú povinní zabezpečiť tieto podmienky ročnej záruky:

- Inštalovať, používať a udržiavať zdravotnícke pomôcky len na určený účel použitia a v súlade s prevádzkovými predpismi (návodom) výrobcu a predpismi upravujúcimi bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
- Viest' prevádzkovú dokumentáciu zdravotníckej pomôcky.

Pri nedodržaní pokynov a odporúčaní v tomto návode sa stôl môže poškodiť, dokonca aj zlomiť. V takomto prípade sa záruka nevzťahuje na stôl. Vyvíjať tlak na stôl opieraním laktí či kolien je zakázané a záruka sa nevzťahuje na škody vzniknuté touto činnosťou. Preťažovať stôl je nebezpečné a zakázané. Udaná nosnosť stola je daná hmotnosťou zákazníka a silou, ktorá sa naňho vyvinie pri manipulácii.

Distribútor, pozáručný servis.

REVIXA s.r.o.
Golianova 564/66
949 12 Nitra

IČO: 50699431
DIČ: 2120430026
IČ DPH: SK2120430026