

# 18 QUART, 6 QUART DIGITAL MASSAGE HEATER

## DIGITÁLNY OHRIEVAČ MASÁŽNYCH KAMEŇOV 17 litrov , 5,4 litra

### Inštrukcie k terapii masážnymi kameňmi

Terapia masážnymi kameňmi je výborná procedúra, ktorá môže priniesť veľa výhod, ak je správne podávaná. Tak ako aj pri iných terapiách je dôležité, aby terapia bola podávaná s dôležitou starostlivosťou k osobe, ktorá ju prijíma. Pred použitím ohrievača masážnych kameňov doporučujeme, aby ste boli zaškolený rehabilitačným špecialistom, alebo absolvovali kurz používania ohrievača masážnych kameňov.

### Obsah

- Bezpečnostné pokyny
- Zapamätajte si tieto pokyny - Upozornenia
- Pred prvým použitím ohrievača masážnych kameňov
- Údržba a čistenie
- Základné vlastnosti – popis zariadenia
- Pokyny na používanie
- Upozornenia a problémy pri používaní ohrievača
- Záruka a servis



# Bezpečnostné pokyny

Pri používaní ohrievača masážnych kameňov musia byť dodržiavané nasledujúce základne bezpečnostné pravidlá :

1. Prečítaj si podrobne Bezpečnostné pokyny pred prvým použitím.
2. Nedotýkaj sa horúceho povrchu. Používaj rukoväta a tlačidlá na reguláciu.
3. Nikdy nedávaj koncovku elektrického kábla do vody, alebo iného roztoku.
4. Zariadenie nemôžu používať deti alebo osoby, ktoré nemajú dostatočnú mentálnu spôsobilosť.
5. Nikdy neobsluhuj ohrievač masážnych kameňov, keď si vo vani, alebo sa sprchuješ.
6. Neopúšťaj ohrievač masážnych kameňov, keď sú v blízkosti malé deti.
7. Pred čistením ohrievača masážnych kameňov odpoj elektrický kábel od elektrickej siete a nechaj ho vychladnúť, až potom môžeš začať čistiť jednotlivé časti ohrievača.
8. Nikdy nepoužívaj ohrievač masážnych kameňov, keď má poškodený elektrický kábel alebo koncovku.
9. Nikdy nepoužívaj ohrievač masážnych kameňov, keď je poškodený pádom na zem.
10. Príslušenstvo, ktoré nie je doporučené výrobcom ohrievača masážnych kameňov nikdy nepoužívaj.
11. Roztok, ktorý nie je doporučený výrobcom nikdy nepoužívaj.
12. Nikdy nepoužívaj ohrievač masážnych kameňov vo vonkajšom prostredí.
13. Nikdy nenechávaj voľný koniec elektrického kábla ohrievača masážnych kameňov voľne prehodený cez horúcu nádobu.
14. Nikdy neumiestni ohrievač masážnych kameňov v blízkosti plynových ohrievačov, elektrických ohrievačov, alebo iných ohrevných zariadení.
15. Venuj maximálnu pozornosť počas prenášania nádoby na vodu naplnenej horúcim roztokom.
16. Nikdy nenapĺňaj nádoby na vodu viac ako 3 cm pod horný okraj nádoby.
17. Ohrievač masážnych kameňov vždy umiestni do roviny.
18. VŽDY najprv umiestni kamene do nádoby na vodu a až potom naplň nádobu vodou. Nepoužívaj ohrievač masážnych kameňov, keď máš na povrchu kože vyrážky, popáleniny, porezanú pokožku, alebo máš akékoľvek poškodenie pokožky na rukách.
19. Nikdy ohrievač masážnych kameňov nevkladaj do čistiaceho zariadenia alebo vodovodného dresu. **POZOR-Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!!!**
20. Vždy najprv skontroluj dotykom teplotu kameňov a až potom ich môžete chytiť a umiestniť na osobu, ktorej poskytuješ masáž horúcimi kameňmi.
21. Na vyberanie kameňov z nádoby na vodu používaj plastovú alebo drevenú naberačku, sieťku alebo teplu a vode odolné rukavice.
22. Nikdy nenalievaj do ohrievača masážnych kameňov horúcu alebo vriacu vodu. Nikdy nenechaj vodu v nádobe priviesť do varu.
23. **Nepoužívaj ohrievač masážnych kameňov na iné účely ako je určený.**

## Zapamätajte si tieto pokyny - Upozornenia

1. Ohrievač masážnych kameňov nesmie byť použitý, ak klient má nasledujúce zdravotné problémy:
  - Tuberkulóza
  - Nádor
  - Otvorené rany
  - Hemoroidy
  - Brucelózu
  - Poškodenú-roztrhnutú pokožku

- Trombóza
  - Zápal žíl
  - Krčové žily
  - Bolesť lýtok
  - Akékoľvek iné bolesti
2. Ľudia, ktorí majú diabetes alebo majú iné ochorenia, musia konzultovať svoj zdravotný stav so svojím ošetrojúcim lekárom a overiť si vhodnosť použitia masáže horúcimi kameňmi pri ich zdravotnom probléme.
  3. Keď klient si nie je istý svojím zdravotným stavom, neposkytujte mu masáž horúcimi kameňmi a doporučte mu návštevu a konzultáciu u svojho lekára.
  4. Neposkytujte masáž horúcimi kameňmi klientovi, ktorý pociťuje nepriaznivý účinok masáže a doporuč mu návštevu a konzultáciu u svojho lekára.
  5. Nepoužívajte zariadenie, ak si ospalý, alebo trpíte ospalosťou.
  6. Ohrievač masážnych kameňov nie je hračka a venujte **maximálnu pozornosť** pri jeho používaní.
  7. Nedovoľte deťom zdržovať sa v blízkosti ohrievača masážnych kameňov!!!



## Pred prvým použitím ohrievača masážnych kameňov

1. Rozbaľte ohrievač masážnych kameňov, vyberte nádobu na vodu spolu s pokrývkou a odstráňte všetko z povrchu ohrievača.
2. Prázdny ohrievač umiestnite na teplú odolnú podložku a na dobre vetrané miesto, aby výpary pri "vypalovaní" ohrievača mohli voľne odchádzať.
3. Zastrčte elektrickú koncovku ohrievača do elektrickej siete 230V a nastavte na displeji stláčaním tlačítka "+" teplotu 70°C. Ohrievač nechajte "vypalovať" cca 60 minút. Po tomto čase prestane vychádzať z ohrievača dym a zápach.
4. Dym a zápach je normálny sprievodný jav pri "vypalovaní" ohrievača, ale na druhej strane dym a zápach sa nesmie objaviť pri bežnom používaní ohrievača masážnych kameňov. Keď "vypalovanie" ohrievača je ukončené, stláčaním tlačítka "-" na displeji nastavte minimálnu teplotu a potom vytiahnite elektrickú zástrčku zo siete.
5. Po tomto procese je ohrievač masážnych kameňov pripravený na používanie.

## Údržba a čistenie

1. Nádobu a ohrievač po každom použití očistite.
2. Pred čistením nastavte na displeji minimálnu teplotu a ohrievač vytiahnite zo zástrčky.
3. Ohrievač nechajte vychladnúť na izbovú teplotu a až potom začnite vykonávať čistenie.
4. Opatrne povyberajte jednotlivé masážne kamene z nádoby a tak isto froté podložku, ktorá bola pod kameňmi a potom vylejte vodu z nádoby.
5. Poumývajte nádobu jemným saponátovým roztokom a dobre ju vyutierajte do sucha.
6. **NIKDY nekladajte ohrievač do dresu alebo čistiacej nádoby, kde je voda, pretože ohrievač nesmie prísť do styku s vodou. Ohrievač možno iba vyutierať navlhčenou handričkou.**
7. Použitú nádobu vložte do dezinfekčného roztoku a po aplikácii tohoto roztoku ich vyberte a nechajte voľne na suchej utierke vysušiť.

## Základné vlastnosti – popis zariadenia

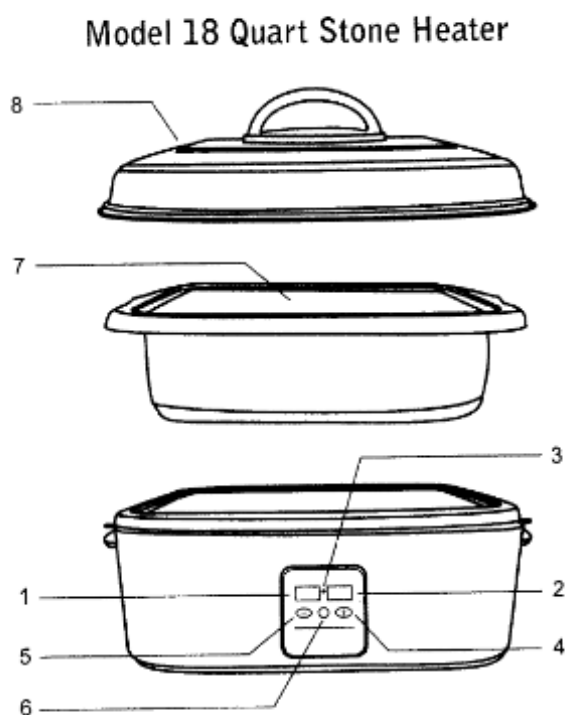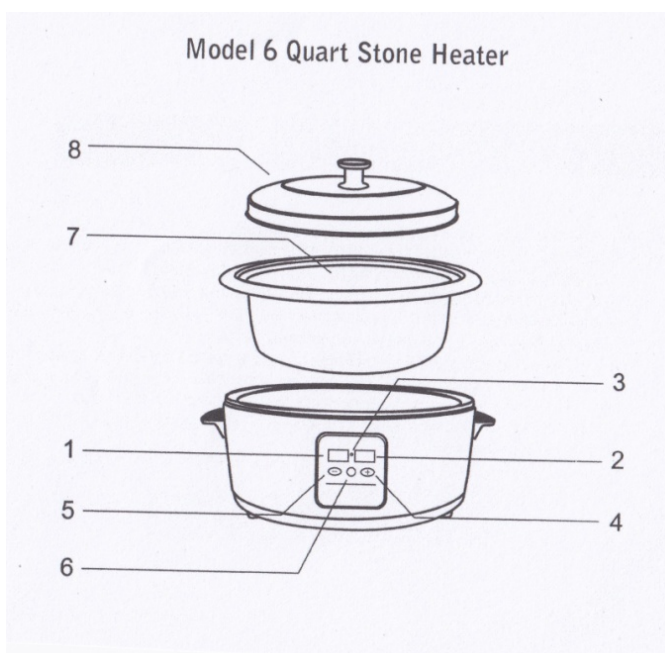

1. Displej – 1 - na Nastavenie teploty. Na displeji je možno odčítať požadovanú nastavenú teplotu .
2. Displej – 2 – na odčítanie aktuálnej teploty. Na tomto displeji je možno čítať kód chyby, ak sa vyskytne chyba pri používaní.

Na displeji je možno odčítať aktuálnu teplotu a tak isto slúži na nastavenie jednotky Celzia alebo Fahrenheit.

3. Indikátor ohrevu - svetelná kontrolka  
Táto kontrolka prestane svietiť, ak Ohrievač dosiahol nastavenú – požadovanú teplotu. Tak isto prestane svietiť, keď ohrievač odpojíme od elektrickej siete.
4. Tlačítko "+"  
Tlačítko umožňuje zvýšenie nastavenia teploty alebo nastavenie stupen Celzia / Fahrenheit.
5. Tlačítko "-"  
Tlačítko umožňuje zníženie nastavenia teploty.
6. ON/OFF tlačítko.  
Tlačítko zapnutia alebo vypnutia Ohrievača.
7. Vyberateľná Nádoba na vodu a na vkladanie kameňov.
8. Pokrývka  
Vždy keď nahrievaš Nádobu s vodou používaj Pokrývku, aby voda v Nádobe neochladzovala.

## Pokyny na používanie

1. Dôkladne poumývaj všetky kamene pred prvým použitím.
2. Vlož **malý uterák** alebo froté látku na dno vyberateľnej nádoby na vodu a poukladaj všetky kamene na uterák.
3. Predtým, ako zasuniete elektrický prírodný kábel Ohrievača masážnych kameňov do elektrickej siete, nalejte do Nádoby vodu, aby ste prekryli vodou všetky kamene a hladina vody bola cca 3-4 cm od horného okraja nádoby. Upozornenie – maximálna hladina vody môže byť maximálne 3cm pod okraj nádoby. Potom nastavte požadovanú teplotu a položte na Nádobu pribalenú Pokrývku.
4. Elektrický kábel zastrčte do elektrickej siete 230V, ktorá má zásuvku riadne uzemnenú podľa predpisu. Stláčaním "+" alebo "-" tlačítkov na displeji nastavte požadovanú teplotu. Vyberte vhodný rozsah teplôt C° Celzius / F Fahrenheit, ktorý sa objaví na Displeji – 2 –
5. Zatlač ON/OFF tlačítko a stláčaním "+" alebo "-" tlačítkov na displeji nastavte požadovanú teplotu na Displej – 1 -
6. Indikátor ohrevu – svetelná kontrolka bude raz zapnutá a raz vypnutá, podľa toho, či sa Nádoba nahrieva, alebo Nádoba dosiahla požadovanú – nastavenú teplotu. Ak odpojíte Ohrievač od elektrickej siete tak svetelná kontrolka prestane svietiť.
7. Opatrne vyber prvý kameň z nádoby a prstom sa dotkni povrchu kameňa. Potom zoberte kameň do ruky a ak cítite, že kameň má vhodnú teplotu a v dlani vás nepáli, môžeš začať s masážou.
8. Po ukončení masáže zatlač tlačítko ON/OFF do polohy OFF a vytiahni elektrický prírodný šnúru zo siete.
9. Nikdy nevhadzujte kamene do Nádoby na vodu, ale ich opatrne poukladaj na dno vyložené uterákom. Hádzanie môže poškodiť dno nádoby.
10. Nikdy nepoužívaj kamene na časti tela, ktoré sú spálené alebo podráždené od slnečného, alebo iného žiarenia.

## Upozornenia a problémy pri používaní ohrievača

1. VYPALOVANIE – keď používaš ohrievač prvýkrát tak ho nechaj v dobre vetranej miestnosti vypáliť. Dym je normálny sprievodný jav pri vypalovaní . Pri vypalovaní dodrž tento postup : Umiestni nádobu v dobre vetranej miestnosti a polož ju na podlahu napr. v garáži a vyber Nádobu a Pokrývku. Nastav max. teplotu 70 C° / 199 F° a nechaj vypalovať a dymiť Ohrievač po dobu

- 60 minút.
2. Rozsah nastavených teplôt na Displeji – 1 - : 105 – 160 F° alebo 40 – 70 C°
  3. Rozsah aktuálnych teplôt na Displeji – 2 - : 32 – 199 F° alebo 0 – 93 C°
  4. Ak teplota je nižšia ako 32 F° alebo 0 C° objaví sa "L " na Displej – 2 - čo zanáčí, že Ohrievač je pod teplotný normal a teplota sa nemôže objaviť. Ak svieti "E1" na Displeji – 2 - , tak Ohrievač má teplotu nad 93 C° / 199 F° a teplota sa nemôže objaviť na displeji.
  5. Ak sa objaví "E2" na Displeji – 2 – tak Ohrievač sa nedá ovládať a bude iba hriať naplno. Ohrievač treba odpojiť od elektrickej siete a v tomto prípade treba kontaktovať servis a nádobu nepoužívať.
  6. Nastavenie požadovanej predvolenej teploty stláčaním "+" alebo "-".
  7. Diagnostika poruchy : Zatláč tlačítko ON/OFF po dobu 3 sec. a Ohrievač si urobí auto diagnostiku . Ak sa objaví na Displeji – 1 – kód "198" a na Displeji – 2 – kód "176" a ozve sa tón, tak nie je problém s ohrievačom. Na Ohrievači nie je jednoducho porucha. Ak sa objaví na "E1" tak ohrievač má problém a treba ho opraviť. Ak sa objaví "E2", tak Ohrievač je nepoužiteľný. Voda sa nedá kontrolované ohrievať a Ohrievač sa nesmie používať.

## Záruka

**Na výrobok sa poskytuje záruka 24 mesiacov od dátumu predaja. Táto záruka sa vzťahuje na vadu materiálu, alebo chybnú montáž výrobku. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie výrobku, alebo na poškodenie z titulu nevhodného zaobchádzania s výrobkom.**

**Ohrievač masážnych kameňov sa nikdy nepokúšajte opraviť. Ak sa zistí, že na ohrievači masážnych kameňov bol robený neodborný zásah záruka nebude uznaná. Záruka sa počíta od dátumu na daňovom doklade.**

**REVIXA s.r.o.  
IČO: 50699431  
DIČ: 2120430026  
IČ DPH: SK2120430026**

**Konateľ: Juraj Kramár  
Adresa: Golianova 66, Nitra  
mob.č.: +421 904 158 489  
Email: info@revixa.sk  
Web: www.revixa.sk  
Web: www.eshop-masaze.sk  
Web: www.eshop-masaze.cz**